



Gebrauchsanleitung

ANTIDEKUBITUSSYSTEME

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Jüttner Orthopädie KG hat für Sie ein Hilfsmittel geliefert.

Zur Vermeidung von Komplikationen und zum Erhalt der Funktionen lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Hinweise. Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, so kontaktieren Sie bitte umgehend den für Sie zuständigen Mitarbeiter der Jüttner Orthopädie KG.

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen bzw. Reparaturen an dem Hilfsmittel vor.

Ihr Team der Jüttner Orthopädie KG

Gebrauchshinweise

Aufstellen der Matratze:

- Bett komplett abräumen (leer machen)
- unter Luftkammer eine mindestens 5 cm hohe Schaumstoffauflage oder eine Standardmatratze legen (Sicherheit)
- Matratze auf Bett legen
- Unterseite der Matratze gegebenenfalls mit Untermatratze fixieren
- darauf achten, dass sich Luftzufuhrschläuche zum Aggregat am Fußende befinden
- Luftzufuhrschläuche mit Aggregat verbinden, bitte dafür sorgen, dass Schläuche nicht verdreht oder abgeknickt sind
- Netzstecker mit Stromnetz verbinden und einschalten, Probereinstellung nach Patientengewicht am Aggregat vornehmen
- auf Matratze Laken oder elastisches großes Spannbettuch legen
- erst jetzt Patient auf Matratze legen
- Achtung: Druck so einstellen, dass Aufliegen des Patienten auf Untermatratze vermieden wird
- Einstellung des Systems erfolgt prinzipiell nach dem „Handtest“

Handtest:

- ausgestreckte Hand zwischen Gesäß des Patienten und Matratze schieben - wenn sich Hand mit leichtem Widerstand unterschieben lässt, liegt Patient optimal, liegt Patient zu hoch: am Aggregat „weicher“ stellen, liegt Patient durch: am Aggregat „härter“ stellen
- „Handtest“ mehrmals wiederholen, bis Patient optimal liegt
- Einstellung auf Aggregat merken und darauf notieren
- täglich „Handtest“ durchführen

Fehlersuche:

- Aggregat am Strom und eingeschaltet?
- Läuft der Motor?
- Aggregat richtig eingestellt?
- CPR-Schalter / Lasche geschlossen?
- Anschlusschläuche kontrollieren: abgerutscht oder abgeknickt?
- Verbindungsschläuche zwischen den Zellen kontrollieren: abgerutscht oder abgeknickt?
- Zellen kontrollieren: Riss oder / und defekt?
- Kein Defekt feststellbar und System baut trotz Maximaleinstellung zu wenig Druck auf?

Kontaktieren Sie uns

Jüttner Orthopädie KG
Zentrale
Im Flarchen 5 a
Tel. (036 01) 46 18-0
Fax (036 01) 46 18-32
info@juettner.de
www.juettner.de

Stand: 30.07.2018