

ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen

Die ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heimanwendung.

Warum hat der Arzt Ihnen die Bewegungstherapie verordnet?

- um Gelenksteifen und Verklebungen vorzubeugen.
- um die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe zu verbessern.
- zur Beschleunigung des Heilungsverlaufes.
- zur Sicherung des Behandlungserfolgs

Wie oft sollen Sie täglich üben?

- Soweit nicht anders vom Arzt verordnet, wird eine Behandlungszeit von 4 bis 5 mal täglich je 60 Minuten empfohlen.
- Übungen immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

Wer holt die Bewegungsschiene wieder bei Ihnen ab?

- 3 Tage vor Ablauf der Verordnungszeit rufen Sie bitte Ihren Patientenbetreuer unter der nachstehenden Telefonnummer an, und wir organisieren die Abholung.

Patientenbetreuer: _____

Telefon: _____

Sie haben Fragen?

Ihr **DJO Global-ARTROMOT®-Team** steht Ihnen gerne zur Verfügung,

Tel. 0800 1 676 333 · Fax 0800 3 676 333
E-Mail: homecareservice@DJOglobal.com

Gute Besserung wünscht Ihr **DJO Global-ARTROMOT®-Team**

ARTROMOT®-S3

Motorisierte Bewegungsschienen
Handprogrammiereinheit: „Grafik“



Handprogrammiereinheit im Menü Auswahlmodus



Handprogrammiereinheit im Programmiermodus



ARTROMOT®-S3

Kurzanleitung¹ zur Handprogrammiereinheit „Grafik“

Starten/Stoppen

1. **Netzstecker** einstecken.
2. ARTROMOT®-S3 am **Netzschalter** einschalten.
3. **Patienten-Chipkarte** in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.
4. **Starten:** **START** drücken.
5. **Stoppen:** **STOP** drücken.
6. **MENU Taste kurz drücken**
(Ebene „M1“ muss auf dem Display angezeigt werden)

Programmieren

7. Taste unterhalb des gewünschten Bildes zur Verstellung drücken um **Funktion auszuwählen**.
 - = seitliches Heben des Armes (Abduktion)
 - = seitliches Senken des Armes (Adduktion)
 - = Drehen des Armes nach innen (Innenrotation)
 - = Drehen des Armes nach außen (Außenrotation)
8. Zum **Verändern der Werte** der ausgewählten Funktion: **+** oder **-** Taste drücken und gedrückt halten. Die Schiene fährt während der Einstellung die Bewegung mit.
9. **Speichern der Einstellung**
STOP drücken. Zum **Starten** des Gerätes **START** drücken.



Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.



¹ Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen mit Handkontroller „Grafik“ von DJO Global.

Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung und ärztliche Einweisung.

² Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.