



Gebrauchsanleitung

SILIKON-HILFSMITTEL

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Jüttner Orthopädie KG hat für Sie ein spezielles Hilfsmittel gefertigt.

Bei diesem Hilfsmittel handelt es sich um eine Sonderanfertigung, die nur für Ihren persönlichen Bedarf und auf Verordnung Ihres behandelnden Arztes hergestellt wurde.

Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt gefertigt und vor der Abgabe an Sie eingehend geprüft. Es entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang 1 der Medical Device Regulation, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 117/1, in Kraft getreten am 25. Mai 2017 (vorher 93/42/EWG).

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, so kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren behandelnden Arzt oder den für Sie zuständigen Mitarbeiter der Jüttner Orthopädie KG.

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen bzw. Reparaturen an dem Hilfsmittel vor.

Zur Vermeidung von Komplikationen und zum Erhalt der Funktionen lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Hinweise.

Ihr Team der Jüttner Orthopädie KG

Gebrauchshinweise

Anziehen:

- Achten Sie auf die korrekte Positionierung, um Hautfalten zu vermeiden.

Materialeigenschaften:

- biokompatibel (geruchs-, geschmacksneutral)
- feuchtigkeitsresistent und wasserbeständig
- UV- und alterungsbeständig
- Einsatztemperatur: -50 bis +240 Grad Celsius

Vermeiden Sie den Kontakt mit:

- Lösungsmitteln (z. B. Verdünner, Aceton, Isopropylalkohol)
- Kraftstoffen (Benzin, Diesel)
- mineralischen Ölen
- mechanischen Einwirkungen (scharfe Gegenstände, Kanten, Spitzen)

Empfohlene Reinigung und Pflege:

- Reinigen Sie täglich das Hilfsmittel mit klarem Wasser und unserem speziellen Silikonreiniger „Derma Clean“
- Pflegen Sie Ihre Haut täglich mit „Derma Prevent“ und „Derma Repair“.
- Verwenden Sie diese Produkte bitte nur auf unverletzter Hautoberfläche
- Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder unseren Orthopädietechniker.

Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung

Jüttner Orthopädie KG

Zentrale

Im Flarchen 5 a

Tel. (036 01) 46 18-0

Fax (036 01) 46 18-32

info@juettner.de

www.juettner.de

Stand: 30.07.2018