



Gebrauchsanleitung

ORTHOPÄDISCHER MASSSCHUH

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

die Jüttner Orthopädie KG hat für Sie ein spezielles Hilfsmittel gefertigt. Bei diesem Hilfsmittel handelt es sich um eine Sonderanfertigung, die nur für Ihren persönlichen Bedarf und auf Verordnung Ihres behandelnden Arztes hergestellt wurde. Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt gefertigt und vor der Abgabe an Sie eingehend geprüft. Es entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang 1 der Medical Device Regulation, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 117/1, in Kraft getreten am 25. Mai 2017 (vorher 93/42/EWG). Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, so kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren behandelnden Arzt oder den für Sie zuständigen Mitarbeiter der Jüttner Orthopädie KG. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen bzw. Reparaturen an dem Hilfsmittel vor.

Zur Vermeidung von Komplikationen und zum Erhalt der Funktionen lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Hinweise.

Ihr Team der Jüttner Orthopädie KG

Gebrauchshinweise

- Schuhe müssen eingelaufen werden
Beginnen Sie mit kurzen Tragezeiten im Haus
- Schuhe vor dem ersten Tragen imprägnieren
- Zum Einstieg in die Schuhe immer einen Schuhanzieher verwenden
- Der Schuhinnenraum muss frei von Fremdkörpern sein
- Vermeiden Sie Strumpffalten
- Beim Anziehen Fuß-, Knie- und Hüftgelenk nach Möglichkeit in Beugestellung bringen
- Führen Sie anfangs nach jedem Tragen der Schuhe eine Fußinspektion durch
- Bei Beschwerden Füße auf Rötungen und Druckstellen untersuchen

- Wenn Schmerzen oder Hautveränderungen auftreten, sofort einen Kontrolltermin bei der Jüttner Orthopädie KG vereinbaren. Bitte bringen Sie Schuhe zum Wechseln mit.
- Die vorhandenen Einlagen und Einbauteile sind immer fester Bestandteil des Schuhs in dem sie gefertigt werden. Belassen Sie Ihre Fußbettung immer in den speziell dafür gefertigten Schuhen
- Achten Sie auf rechtzeitige Instandsetzung von Sohlen und Absätzen. Abgelaufene Sohlen und Absätze führen zu Fehlbelastungen der Füße und können den Schuhunterbau beschädigen
- Sind die Fußbettungen durch starke Beanspruchung verbraucht, müssen diese ersetzt werden
- Die Jüttner Orthopädie KG garantiert Ihnen eine fachgerechte Reparatur
- Schuhe niemals an einer direkten Wärmequelle trocknen (z.B. Sonne oder Heizung), bei Bedarf mit Zeitung ausstopfen
- Nur passendes Pflegemittel verwenden, um das Oberleder weich und geschmeidig zu halten
- Das Mikrofaser-Futter bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen
- Bei Kindern ist unbedingt auf das Wachstum zu achten, zu kleine Maßschuhe können große Schädigungen verursachen
- Behandeln Sie Ihr Hilfsmittel sorgfältig
Sollten dennoch einmal Probleme damit auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an die Jüttner Orthopädie KG

Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung

Jüttner Orthopädie KG

Zentrale

Im Flarchen 5 a

Tel. (0 36 01) 46 18-0

Fax (0 36 01) 46 18-32

info@juettner.de

www.juettner.de

Stand: 26.06.2018