



## Gebrauchsanleitung

# ORTHESEN, PROTHESEN, RUMPFORTHESEN MIEDER, LEIBBINDE

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

die Jüttner Orthopädie KG hat für Sie ein spezielles Hilfsmittel gefertigt.

Bei diesem Hilfsmittel handelt es sich um eine Sonderanfertigung, die nur für Ihren persönlichen Bedarf und auf Verordnung Ihres behandelnden Arztes hergestellt wurde.

Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt gefertigt und vor der Abgabe an Sie eingehend geprüft. Es entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang 1 der Medical Device Regulation, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 117/1, in Kraft getreten am 25. Mai 2017 (vorher 93/42/EWG).

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, so kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren behandelnden Arzt oder den für Sie zuständigen Mitarbeiter der Jüttner Orthopädie KG.

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen bzw. Reparaturen an dem Hilfsmittel vor.

Zur Vermeidung von Komplikationen und zum Erhalt der Funktionen lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Hinweise.

Ihr Team der Jüttner Orthopädie KG

## **Orthesen, Prothesen, Rumpforthesen** **Gebrauchshinweise**

- Prüfen Sie Ihre Orthese, Prothese bzw. Rumpforthese vor jeder Verwendung auf einwandfreie Funktion und einwandfreien Zustand.
- Beachten Sie beim Anziehen die richtige Reihenfolge. Ziehen Sie zuerst die korrekte Anzahl von Stumpfstrümpfen bei Prothesen bzw. Baumwollhemden oder T-Shirts bei Rumpforthesen an.
- Achten Sie auf die richtige räumliche Ausrichtung der Hilfsmittel am Körper. Vermeiden Sie beim Anziehen Falten und Quetschungen von Haut oder sonstigem Gewebe. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Haut, achten Sie auf Druckstellen und Verfärbungen.
- Schließen Sie die Verschlüsse gleichmäßig, aber nicht zu fest.
- Achten Sie bei Linern auf die richtige Position des Verschlussstiftes, er muss sicher und korrekt einrasten.
- Tragen Sie die Prothesen nur in Schuhen mit der richtigen Absatzhöhe.
- Führen Sie möglichst täglich die Hautpflege, -hygiene und -massage durch.

## **Pflegehinweise**

Reinigen und pflegen Sie die innenliegenden, mit Haut in Kontakt kommenden Teile des Hilfsmittels täglich mit geeigneten Reinigungsmitteln.

## **Schutz des Hilfsmittels**

Vermeiden Sie folgende Einflüsse:

- direkte Wassereinwirkung (z. B. Bad, Wassersport), es sei denn, Ihr Hilfsmittel ist ausdrücklich dafür zugelassen
- hohe Temperaturen (z. B. Sonne, Heizung)
- offene Flammen
- Temperaturen von unter -30 °C

## **Mieder / Leibbinde**

### **Gebrauchshinweise**

- Prüfen Sie Ihr Mieder bzw. Ihre Leibbinde vor jeder Verwendung auf einwandfreie Funktion und einwandfreien Zustand.
- Tragen Sie Ihr Mieder bzw. Ihre Leibbinde nur tagsüber. Ziehen Sie bitte immer ein Baumwollhemd oder T-Shirt unter. Achten Sie beim Anziehen von Mieder bzw. Leibbinde auf den richtigen Sitz, die richtige Höhe und Seitenausrichtung. Justieren Sie bei Kreuzstützmiedern die Höhe der hinteren Pelotte entsprechend der gewünschten Entlastungswirkung.
- Schließen Sie Schnüre und Verschlüsse gleichmäßig, aber nicht zu fest von unten nach oben. Berücksichtigen Sie gegebenenfalls Änderungen des Körpergewichts.

## **Pflegehinweise**

Reinigen Sie Ihr Mieder bzw. Ihre Leibbinde in Handwäsche bei 30° C. Entfernen Sie die hintere Pelotte (Pelotte bei 30° C waschbar, Lederpelotte mit nicht zu feuchtem Tuch bzw. Waschbenzin abreiben) und schließen Sie etwaige Klettverschlüsse vor der Reinigung. Denken Sie daran, die Pelotte nach der Reinigung wieder einzusetzen.

## **Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung**

Jüttner Orthopädie KG

Zentrale

Im Flarchen 5 a

Tel. (036 01) 46 18-0

Fax (036 01) 46 18-32

info@juettner.de

www.juettner.de

Stand: 30.07.2018