



## Gebrauchsanleitung

### SITZSCHALEN

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

die Jüttner Orthopädie KG hat für Sie ein spezielles Hilfsmittel gefertigt.

Bei diesem Hilfsmittel handelt es sich um eine Sonderanfertigung, die nur für Ihren persönlichen Bedarf und auf Verordnung Ihres behandelnden Arztes hergestellt wurde.

Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt gefertigt und vor der Abgabe an Sie eingehend geprüft. Es entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang 1 der Medical Device Regulation, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 117/1, in Kraft getreten am 25. Mai 2017 (vorher 93/42/EWG).

Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, so kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren behandelnden Arzt oder den für Sie zuständigen Mitarbeiter der Jüttner Orthopädie KG.

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen bzw. Reparaturen an dem Hilfsmittel vor.

Zur Vermeidung von Komplikationen und zum Erhalt der Funktionen lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Hinweise.

Ihr Team der Jüttner Orthopädie KG

#### Gebrauchshinweise

- Prüfen Sie vor jeder Nutzung der Sitzschale diese auf einwandfreien Zustand und Funktion.
- Insbesondere prüfen Sie die sichere Verbindung zwischen Sitzschale und Rollstuhl / Untergestell.
- Prüfen Sie direkt nach dem Einsetzen in die Sitzschale den korrekten Sitz und vergewissern Sie sich, dass zwischen Körper und Sitzschale getragene Kleidung faltenfrei anliegt um Druckstellen zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie die korrekte Funktion und den korrekten Sitz vorhandener Positionierungsurte.
- Kontrollieren Sie täglich den Zustand der Haut auf Verfärbungen (Gefahr von Haut / Gewebeschäden) oder Druckstellen. Bei Auffälligkeiten kontaktieren Sie bitte umgehend die Jüttner Orthopädie KG.
- Ein Transport in der Sitzschale in einem KFZ ist nur mit einem vom Hersteller entsprechend freigegebenen Untergestell in Verbindung mit entsprechend zugestütztem Rückhaltesystem zulässig.
- Grundsätzlich muss das Sitzschalensystem mit dem Dreipunkt-Gurtsystem des KFZ gesichert sein.
- Von der Jüttner Orthopädie KG angebaute Gurte, Kopfstützen und sonstige Anbauteile dienen ausschließlich der Positionierung und sind baulich nicht als Rückhaltesystem für den KFZ-Transport ausgelegt.
- Eine Fixierung des Kopfes durch Stirnbänder oder ähnliches ist beim KFZ-Transport unbedingt zu unterlassen.

- Die Sitzschale ist abwaschbar. Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Die Sitzschalenbezüge sind bei 30 Grad Celsius mit einem neutralen Waschmittel waschbar. Sie sind nicht trocknergeeignet.

**Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung**

Jüttner Orthopädie KG  
*Zentrale*  
Im Flarchen 5 a  
Tel. (036 01) 46 18-0  
Fax (036 01) 46 18-32  
info@juettner.de  
www.juettner.de

*Stand: 04.12.2018*