




KYMCO
H E A L T H C A R E

Bedienungsanleitung Super HMV

HMV-Nr.: 18.51.05.1037

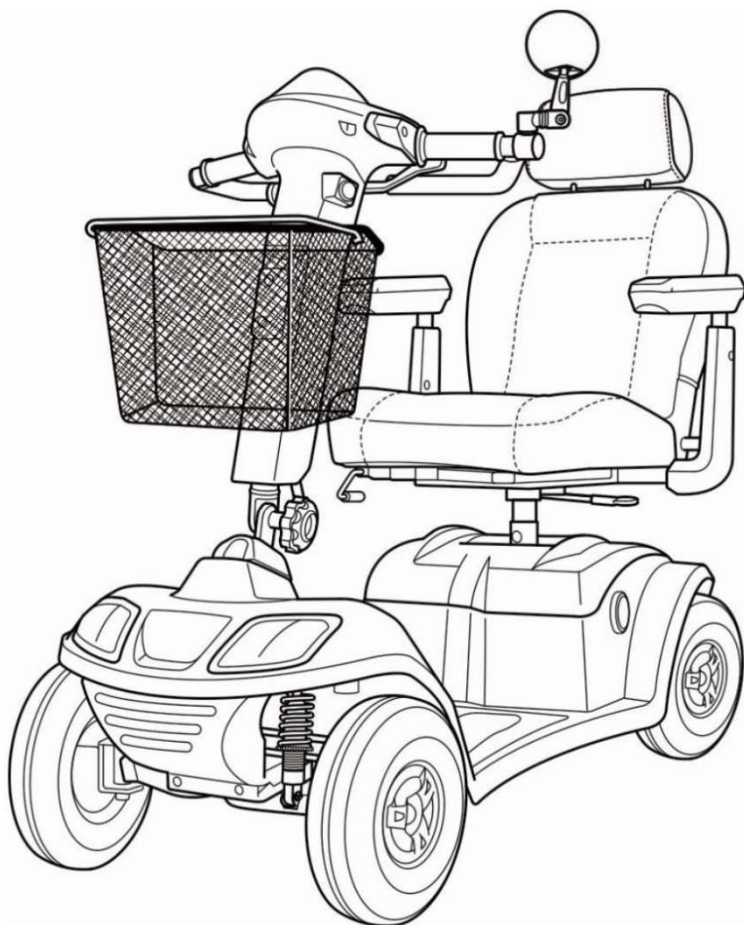

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

EHE SIE LOSFAHREN.....	1
1. GEBRAUCHSHINWEISE.....	1
2. EINLEITUNG.....	2
3. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE.....	3
4. MACHEN SIE SICH MIT IHREM ELEKTROMOBIL VERTRAUT.....	14
5. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN.....	16
6. SCHIEBEN UND BEFÖRDERN DES ELEKTROMOBILS.....	17
6.1 SCHIEBEN DES ELEKTROMOBILS.....	17
6.2 BEFÖRDERN DES ELEKTROMOBILS.....	18
6.3 BEFÖRDERUNG DES ELEKTROMOBILS IN BUSSEN DES ÖPNV.....	19
7. ANPASSEN DES ELEKTROMOBILS.....	20
7.1 ANPASSUNG DES ABSTANDES ZWISCHEN SITZ UND LENKER.....	20
7.2 SCHWENKEN DES SITZES ZUM AUF- ODER ABSTEIGEN.....	20
7.3 EINSTELLEN DER ARMLEHNEN.....	21
7.4 EINSTELLEN DER SITZHÖHE.....	22
7.5 NEIGUNGSWINKEL DER RÜCKENLEHNE EINSTELLEN.....	23
7.6 HÖHE DER KOPFSTÜTZE EINSTELLEN	23
7.7 NEIGUNGSWINKEL DER LENKSÄULE EINSTELLEN	24
7.8 DREHEN DES SITZES.....	24
NUTZUNG.....	26
8. NUTZUNG DES ELEKTROMOBILS.....	26
8.1 AN-/ AUSSCHALTEN.....	27
8.2 STATUS-LED.....	27
8.3 EINSTELLEN DER GESCHWINDIGKEIT.....	28
8.4 VOR- UND RÜCKWÄRTSFAHREN.....	29
8.5 BREMSEN UND FESTSTELLBREMSE VERWENDEN.....	29
8.6 ÜBERLASTSCHUTZ.....	30
8.7 BETÄTIGEN DER HUPE	31
8.8 BETÄTIGEN DER BLINKER	31
8.9 EINSCHALTEN DER SCHEINWERFER.....	31
8.10 EINSCHALTEN DER WARNBLINKER.....	31
8.11 ABSCHALTEN / ABSTELLEN DES ELEKTROMOBILS.....	32
9. BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN.....	33

Inhaltsverzeichnis

9.1 BATTERIESTATUSANZEIGE.....	34
9.2 LADEN DER BATTERIEN.....	34
9.3 NACH DEM LADEN.....	38
9.4 FEHLERMELDUNGEN.....	39
10. HINWEISE ZUM WIEDEREINSATZ.....	40
11. REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSHINWEISE.....	40
11.1 REINIGUNG.....	40
11.2 DESINFEKTION.....	41
12. SERVICE UND WARTUNG.....	41
13. GARANTIE.....	45

GEBRAUCHSHINWEISE

EHE SIE LOSFAHREN

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Elektromobil, das für den Einsatz im Außenbereich auf ebenem Untergrund wie Bürgersteigen, Straßen und Parkplätzen konzipiert wurde.

Er dient dazu, die Mobilität von Nutzern zu verbessern, die körperlich und geistig dazu in der Lage sind, Situationen im Straßenverkehr korrekt einzuschätzen und jederzeit angemessen darauf zu reagieren.



Einsatz: Betreiben Sie das Elektromobil erst, wenn Sie das dazugehörige Benutzerhandbuch gelesen und verstanden haben.

Falls Sie Schwierigkeiten haben, bestimmte Warn- und Sicherheitshinweise oder andere Angaben zu verstehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, da Sie andernfalls Verletzungen an Personen oder Schäden am Gerät riskieren.

Alle Vorgehensweisen, die nicht mit den hier beschriebenen übereinstimmen, dürfen **nur** von einem entsprechend geschulten Techniker ausgeführt werden.

Indikation: Stark eingeschränkte Gehfähigkeit im Rahmen des Grundbedürfnisses sich in der eigenen Wohnung zu bewegen und die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen Spaziergang an die frische Luft zu kommen oder um die üblicherweise im Nahbereich der Wohnung liegenden Stellen zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind.

Eine Versorgung mit einem Elektromobil ist dann angezeigt, wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes aber noch möglich ist.

Wir behalten uns das Recht vor, dieses Benutzerhandbuch unangekündigt zu ändern und / oder zu aktualisieren.

Copyright © 2013 Kymco HealthCare Inc.

Das Elektromobil erfüllt alle Anforderungen nach ISO 7176-9:2009

EINLEITUNG

SEHR GEEHRTER KUNDE

Mit Ihrem Elektromobil haben Sie ein Produkt erworben, das gemäß den neuesten technischen Möglichkeiten und für den höchstmöglichen Bedienkomfort des Nutzers hergestellt wurde.

Sowohl bei der Bauart als auch bei der Materialauswahl lag unser Fokus darauf, eine möglichst unkomplizierte Bedienbarkeit und lange Lebensdauer des Fahrzeugs zu erreichen.

Unser Sortiment wird zudem durch eine große Vielzahl nützlicher Zubehörteile für das Elektromobil vervollständigt.

Das Handbuch führt Sie an die Funktionen Ihres Geräts heran und erklärt zudem dessen

- Betrieb
- Pflege und Wartung
- Reparatur

Es wurde unter Zuhilfenahme der zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Angaben zu Bauweise und Betrieb des Elektromobils erstellt.

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen vor.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Elektromobil haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG! Fahren Sie bitte erst mit Ihrem Elektromobil, wenn Sie die Bedienungsanleitung dazu gelesen und verstanden haben.

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, seien Sie bei der Nutzung des Geräts bitte stets absolut aufmerksam.



ACHTUNG! Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise, um die aus der unsachgemäßen Nutzung des Elektromobils resultierenden Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Es obliegt dem Nutzer des Elektromobils angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Wir haften nicht für Sach- oder Personenschäden, die sich aus der unsachgemäßen Nutzung des Geräts ergeben.

Bitte beachten Sie die vor Ort geltenden Vorschriften für den Straßenverkehr. Möglicherweise sind Sie für Dritte nur schwer zu erkennen, wenn Sie auf dem Elektromobil sitzen. Bitte warten Sie bis Ihr Fahrweg frei ist, ehe Sie äußerst vorsichtig weiterfahren.

Um Ihre eigene Sicherheit bestmöglich zu garantieren, verwenden Sie bitte auch Sicherheitsausrüstung wie etwa Reflektoren oder reflektierende Kleidung, Licht oder Sicherheitswimpel.



ACHTUNG! Bitte ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, wenn Sie verschreibungspflichtige oder frei verkäufliche Medikamente einnehmen und / oder an körperlichen Einschränkungen leiden, die sich möglicherweise auf Ihre Fähigkeit zur sicheren Nutzung des Elektromobils auswirken könnten.



ACHTUNG! Nutzen Sie das Elektromobil nicht, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen.



ACHTUNG! Das Fahrverhalten einzelner Elektromobile ist unterschiedlich. Nehmen Sie sich deshalb die Zeit, Ihr Elektromobil vorab gut kennenzulernen.



ACHTUNG! Bitte bedenken Sie, dass es einige Zeit und Übung erfordert, bis Sie Ihr Elektromobil gut und sicher beherrschen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG! Der Kippschutz reduziert deutlich das Risiko nach hinten umzukippen und sich dabei ernsthaft zu verletzen.



ACHTUNG! Üben Sie unter Aufsicht auf Ihr Elektromobil bzw. von diesem abzusteigen bis Sie diese Vorgänge sicher beherrschen.



ACHTUNG! Führen Sie neue Manöver prinzipiell NICHT durch, wenn Sie allein sind.



ACHTUNG! Informieren Sie sich über die Bereiche, in denen Sie Ihr Elektromobil zu nutzen beabsichtigen. Suchen Sie diese nach möglichen Gefahrenquellen ab und finden Sie heraus, wie sie sich umgehen lassen.



ACHTUNG! Nutzen Sie Ihr Elektromobil ausschließlich wie vorgesehen. Nutzen Sie es nicht für Aktivitäten, die Sicherheitsrisiken bergen oder das Elektromobil unangemessenen Belastungen aussetzen (wie etwa für Krafttraining, Sport oder Leichtathletik; Transporte oder zum Bewegen bzw. Ziehen von Gegenständen).



ACHTUNG! Ihr Elektromobil ist lediglich für einen Fahrer konzipiert. Befördern Sie damit keine weiteren Personen.



ACHTUNG! Wir empfehlen dringend, während der Nutzung des Elektromobils nicht zu rauchen. Sollten Sie sich dennoch dafür entscheiden, lassen Sie angezündete Zigaretten bitte keinesfalls unbeaufsichtigt. Halten Sie Aschenbecher weit genug von den Sitzpolstern entfernt. Achten Sie stets darauf, dass die Zigaretten richtig ausgedrückt sind, ehe Sie sie entsorgen.



ACHTUNG! Verändern Sie das Elektromobil keinesfalls eigenständig. Zum Einbau von Zubehörteilen wenden Sie sich bitte an geschultes Service-Personal oder Ihren anerkannten Vertriebspartner.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG! Durch das Anbringen von Zubehörteilen können sich bestimmte Parameter Ihres Elektromobils (wie Gesamtgewicht, Abmessungen und / oder Schwerpunkt) ändern. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Änderungen das Risiko von Beschädigungen an Gegenständen im Umfeld des Elektromobils erhöhen können.



ACHTUNG! Tauschen Sie nicht beliebig Komponenten (z.B. den Sitz) an Ihrem Elektromobil aus. Verwenden Sie ausschließlich Sitze, die auf Sicherheit getestet und vom Hersteller angeboten wurden.



ACHTUNG! Nehmen Sie das originale Sitzpolster nicht ab und legen Sie keine Kissen oder andere Unterlagen auf den Sitz, da Sie sonst möglicherweise instabil sitzen und die Gefahr besteht, dass Sie vom Elektromobil fallen.



ACHTUNG! Seien Sie beim Umgang mit Sauerstoff in der Nähe von Stromkreisen und brennbarem Material höchst vorsichtig. Weitere Informationen zum sicheren Umgang mit Sauerstoff erhalten Sie bei Ihrem Sauerstofflieferanten.



ACHTUNG! Ändern Sie nichts an den Einstellungen der Steuerung. Um die Steuereinstellungen Ihres Elektromobils alle sechs bis zwölf Monate überprüfen zu lassen, wenden Sie sich bitte an einen anerkannten Vertriebspartner. Dieser ist auch Ihr Ansprechpartner, falls Sie bemerken, dass sich Ihr Elektromobil nicht wie gewohnt steuern lässt.



ACHTUNG! Versetzen Sie Ihr Elektromobil nur dann in den Leerlauf, wenn eine weitere Person anwesend ist.



ACHTUNG! Versetzen Sie das Elektromobil nicht in den Leerlauf, solange er noch eingeschaltet ist. Schalten Sie das Elektromobil prinzipiell ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab, ehe Sie den Leerlaufmodus aktivieren oder deaktivieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG! Versetzen Sie das Elektromobil niemals an Anstiegen oder Abhängen in den Leerlauf, damit es sich nicht unkontrolliert von allein bewegt.



ACHTUNG! Wenn Sie beabsichtigen das Elektromobil längere Zeit nicht zu bewegen, schalten Sie es aus, damit es sich nicht unerwartet und / oder unkontrolliert in Bewegung setzen kann.



ACHTUNG! Bringen Sie keine Zubehörteile an, die die Bedienung der Fahrhebelwippe so beeinträchtigen könnten, dass sich das Elektromobil unerwartet und / oder unkontrolliert bewegt.



ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass Ihre Körperteile, Kleidung und andere Gegenstände während der Fahrt den Rädern nicht zu nahe kommen. Sorgen Sie dafür, dass das fahrende Elektromobil keine Gegenstände hinter sich herzieht. Locker sitzende Kleidung und andere Gegenstände könnten sich in den Rädern und / oder dem Fahrwerk verfangen.



ACHTUNG! Es besteht Strangulationsgefahr! Bedenken Sie bitte, dass sich Kleidungsstücke, Kordeln, Halsketten, sonstiger Schmuck, Geldbörsen und andere Zubehörteile um die Armlehnen und / oder die Fahrhebelwippe wickeln und darin verfangen könnten, während Sie den Roller nutzen.



ACHTUNG! Schließen Sie keine Geräte an die Elektrik des Elektromobils an und nutzen Sie die Batterien ausschließlich zum Betreiben desselben.



ACHTUNG! Greifen Sie zur Vermeidung von Beschädigungen beim Ziehen von Kabeln stets den Stecker selbst. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.



ACHTUNG! Halten Sie die Stecker aller Ladestromkabel stets sauber, trocken und fern von Feuchtigkeit, um Schäden an der Elektrik und / oder Personenschäden zu vermeiden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Überprüfen Sie die Schalter auf lose, abgenutzte und schadhafte Stellen und lassen Sie defekte Kabel unverzüglich austauschen.



ACHTUNG! Sichern Sie das Elektromobil und seine Batterien bei jedem Transport. Die Batterien sollten dabei in aufrechter Stellung gesichert und ihre Anschlussklemmen mit Schutzkappen versehen werden. Befördern Sie das Elektromobil und / oder die Batterien nicht gemeinsam mit brennbaren Materialien.



ACHTUNG! Jeder Umgang mit den Batterien sollte im Beisein eines qualifizierten Service-Technikers erfolgen. Batteriepole, -klemmen und ähnliche Komponenten enthalten Blei oder Bleiverbindungen und können daher Risiken bergen. Zudem sind die Batterien des Elektromobils schwer. Sie sollten daher prinzipiell unter Anwendung entsprechender Vorgehensweisen und ausschließlich von solchen Personen angehoben werden, die dazu auch fähig sind.



ACHTUNG! Versuchen Sie KEINESFALLS die Batterien wieder aufzuladen, indem Sie Kabel direkt an die Batterieklemmen anschließen.



ACHTUNG! Versuchen Sie KEINESFALLS gleichzeitig die Batterien wieder aufzuladen und dabei das Gerät zu betreiben.



ACHTUNG! Verwenden Sie stets zwei Batterien von exakt derselben Art, chemischen Zusammensetzung und Amperestundenleistung (Ah). Achten Sie auf die in der Gebrauchsanleitung enthaltenen Angaben zu Art und Leistungsvermögen der Batterien.



ACHTUNG! Verwenden Sie nicht gebrauchte und neue Batterien gleichzeitig. Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus.



ACHTUNG! Für das Elektromobil sollten ausschließlich versiegelte Batterien verwendet werden. Um ihre Konformität, Tauglichkeit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir, Ersatzbatterien

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

ausschließlich über anerkannte Vertriebspartner zu beziehen.



ACHTUNG! Schützen Sie die Batterien stets vor Frost. Falls es in Ihrer Wohngegend sehr kalt werden kann, stellen Sie das Elektromobil bitte gut geschützt ab. Laden Sie keinesfalls eingefrorenen Batterien auf, das könnte die Batterie schädigen!



ACHTUNG! Entfernen Sie keinesfalls die Sicherungselemente aus den Batterieleitungen. Falls die Sicherungselemente schadhaft erscheinen, wenden Sie sich bitte an Ihren anerkannten Vertriebspartner.



ACHTUNG! Verwenden Sie das Elektromobil nicht, wenn der Ladezustand der Batterien niedrig ist. Sie kommen andernfalls möglicherweise nicht an Ihr Ziel!



ACHTUNG! Wenn Sie wenden oder Hindernisse umfahren, reduzieren Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit, vermeiden Sie starke Drehungen und achten Sie darauf, dass Ihr Schwerpunkt stabil bleibt. Verlagern Sie Ihr Gewicht nicht entgegen der Drehrichtung, da Sie andernfalls umkippen könnten.



ACHTUNG! Wenn Sie Anstiege oder Randsteine bewältigen müssen, fahren Sie geradeaus und halten Sie die Räder senkrecht (gerade) zum Anstieg oder Randstein. Beide Räder sollten gleichzeitig den Anstieg / Randstein befahren. Um die Gefahr eines Sturzes zu minimieren, fahren Sie Anstiege und Randsteine nicht seitlich an und versuchen Sie nicht, diese zunächst mit nur einem Rad zu überwinden. Seien Sie stets äußerst aufmerksam, wenn Sie Anstiege passieren.



ACHTUNG! Befahren Sie keine potentiell gefährlichen Anstiege und Untergründe wie etwa Bereiche, die mit Schnee, Eis, Rasenschnitt oder nassem Laub usw. bedeckt sind.



ACHTUNG! Halten Sie das Elektromobil beim Bewältigen von Anstiegen möglichst nicht an. Falls dies doch erforderlich ist, fahren Sie zunächst

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

langsam wieder an und beschleunigen Sie dann vorsichtig.



ACHTUNG! Fahren Sie Abhänge mit möglichst geringer Geschwindigkeit herab. Falls Sie dabei schneller werden als gewünscht, lassen Sie die Fahrhebelwippe los, damit das Elektromobil anhält. Drücken Sie die Fahrhebelwippe dann leicht, um die Geschwindigkeit des Elektromobils entsprechend zu steuern.



ACHTUNG! Die maximal empfohlenen Anstiegswinkel (siehe Spezifikationen) wurden in kontrollierter Umgebung getestet. Die Leistungsfähigkeit Ihres Elektromobils beim Bewältigen von Anstiegen wird u.a. auch durch Ihr Gewicht, die Geschwindigkeit und den Anfahrtswinkel beeinflusst.



ACHTUNG! Fahren Sie ausschließlich auf ebenem Untergrund rückwärts und tun Sie dies bei langsamer, gleichmäßiger Geschwindigkeit. Halten Sie dabei wiederholt an und vergewissern Sie sich, dass der Fahrweg frei von Hindernissen ist. Um Stürze zu vermeiden, befahren Sie Abhänge oder Rampen nicht rückwärts.



ACHTUNG! Um Stürze zu vermeiden, versuchen Sie bitte keinesfalls, Abhänge, Anstiege und / oder Hindernisse zu bewältigen, während Ihr Sitz in Liegeposition gestellt ist.



ACHTUNG! Um eine Überladung des Elektromobils und mögliche Stürze zu vermeiden, befördern Sie (auch im Korb) keine Gegenstände, die mehr als 5 kg wiegen.

ACHTUNG! Vermeiden Sie im Elektromobil Positionsänderungen und Bewegungen, die Ihren Schwerpunkt verlagern könnten, da das Elektromobil sonst möglicherweise umkippt.



ACHTUNG! Eine Gefällesteigerung von ca. 5 cm am Fuße eines Abhangs reicht aus, um die Fronträder zu blockieren und das Elektromobil vornüber kippen zu lassen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG! Greifen Sie prinzipiell nicht nach etwas und beugen Sie sich nicht vornüber, wenn Sie dabei Ihr Gewicht verlagern oder sich aus dem Sitz erheben müssen.



ACHTUNG! Greifen Sie nicht nach Gegenständen, wenn Sie sich im Sitz nach vorne schieben müssen, um daran zu gelangen. Achten Sie darauf, stets in Kontakt mit Sitzfläche und Rückenlehne zu bleiben.



ACHTUNG! Greifen Sie keinesfalls nach Gegenstände, um diese vom Boden aufzuheben.



ACHTUNG! Greifen Sie nicht nach Gegenständen, wenn Sie sich dafür über die Oberkante der Sitzrückenlehne beugen müssten. Die Rückenlehne könnte dabei Schaden nehmen und Sie könnten stürzen.



ACHTUNG! Legen Sie keine Gewichte auf den Armlehnen ab, da das Elektromobil sonst umkippen und Sie aus ihm herausfallen und sich verletzen könnten.



ACHTUNG! Verlagern Sie nicht Ihr gesamtes Gewicht auf eine Seite des Elektromobils, da dieses sonst umkippen könnte.



ACHTUNG! Auch wenn Ihr Elektromobil größere Hindernisse bewältigen kann, empfehlen wir, Randsteine von mehr als 5 cm Höhe nicht zu befahren, da das Elektromobil andernfalls möglicherweise nicht stabil ist. Beim Befahren von Randsteinen und anderen Hindernissen besteht das Risiko, dass das Elektromobil umkippt - und folglich die Gefahr ernsthafter Verletzungen. Im Zweifelsfall **BITTEN SIE PRINZIPIELL UM HILFE** beim Befahren von Randsteinen oder Hindernissen. Machen Sie sich Ihre Fertigkeiten und persönlichen Grenzen bewusst. Möglicherweise müssen Türschwellen entfernt und / oder Rampen an Aus-/Zugängen angebracht werden.



ACHTUNG! Versuchen Sie nicht, Hindernisse auf Anstiegen zu bewältigen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG! Befahren Sie Hindernisse nicht nur mit einem Rad.



ACHTUNG! Befahren Sie keine unebenen und / oder nachgiebigen Untergründe.



ACHTUNG! Fahren Sie nicht in der Nähe von langem Gras, das sich im Fahrwerk verfangen könnte.



ACHTUNG! Fahren Sie nicht auf losem Kiesel und / oder sandigem Untergrund.



ACHTUNG! Fahren Sie mit dem Elektromobil nicht auf oder neben Bahngleisen oder -übergängen.



ACHTUNG! Fahren Sie mit dem Elektromobil nicht am Ufer von großen Flüssen, Seen oder dem Strand. Überqueren Sie mit dem Elektromobil keinesfalls Wasserläufe.



ACHTUNG! Wenn Sie beim Befahren eines bestimmten Untergrundes unsicher sind, meiden Sie diesen Untergrund.



ACHTUNG! Halten Sie das Elektromobil fern von offenem Feuer.



ACHTUNG! Halten Sie das Elektromobil trocken und sauber. Fahren Sie es keinesfalls in Dusch- oder Badebereiche, Schwimmbäder oder Saunen. Regen, Schnee, Streusalz, Spritzwasser und Wasserdampf sowie eisbedeckte und rutschige Untergründe können Komponenten des Elektromobils beschädigen und dazu führen, dass das Fahrgestell vorzeitig rostet.



ACHTUNG! Setzen Sie Ihr Elektromobil nicht über längere Zeiträume hinweg großer Hitze oder Kälte aus, was sich auf die Temperaturen seiner gepolsterten und nicht-gepolsterten Komponenten auswirken könnte.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Nutzen Sie Ihr Elektromobil bei großer Hitze oder Kälte umsichtig.



ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Elektromobil nicht durch Fahrzeuge abschleppen. Dabei wird die Höchstgeschwindigkeit überschritten und wichtige Komponenten beschädigt. Des Weiteren erlischt die Garantie.



ACHTUNG! Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn unbemannte Elektromobile Treppen hinauf- oder hinabbefördert werden müssen. Nehmen Sie zuvor Sitz, Akkus und mögliche Zubehörteile ab. Heben Sie das Elektromobil dann mit mehreren geeigneten Personen unter Anwendung geeigneter Verfahren und ausschließlich an festen, nicht-abnehmbaren Teilen des Gestells an. Greifen Sie beim Heben oder Bewegen des Elektromobils nicht an abnehmbare Komponenten wie etwa Armlehnen, Sitzpolster, Lehne oder Verkleidungen.



ACHTUNG! Schalten Sie das Elektromobil stets ab, wenn es mit Hebegerät bewegt wird. Vergewissern Sie sich außerdem, dass es nicht im Leerlauf ist und setzen Sie sich bei solchen Manövern keinesfalls in das Elektromobil. Möglicherweise bewegt sich das Gerät unbeabsichtigt, was schwerwiegende Sach- oder Personenschäden zur Folge haben kann.



ACHTUNG! Befahren Sie mit Ihrem Elektromobil keinesfalls Treppen und / oder Rolltreppen.



ACHTUNG! So steigen Sie auf das Elektromobil oder von diesem ab: Schalten Sie dafür das Elektromobil prinzipiell aus, andernfalls kommen Sie möglicherweise an die Fahrhebelwippe und Ihr Elektromobil bewegt sich dadurch unbeabsichtigt. Vergewissern Sie sich, dass die Magnetbremse aktiviert ist. So kann sich das Elektromobil nicht bewegen, während Sie auf oder absteigen.



ACHTUNG! Bestmögliche Kontrolle über das Gerät erlangen Sie, wenn Sie den im Benutzerhandbuch empfohlenen Reifendruck sicherstellen. Pumpen Sie die Reifen ausschließlich mit geregelten Niederdruckluft-

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

quellen mit Druckanzeige auf. Achten Sie darauf, dass der Reifendruck weder zu hoch noch zu niedrig ist. Ist der Reifendruck zu gering, ist das Elektromobil nur schwer zu steuern. Zu hoher Druck hingegen kann dazu führen, dass die Reifen bersten. Überprüfen Sie den Reifendruck mindestens einmal wöchentlich.



ACHTUNG! Falls sich die Verschraubungen am Sitz lösen, wenden Sie sich bitte an Ihren anerkannten Vertriebspartner.





ACHTUNG! Quellen von Funkwellen, wie Funk- und Fernsehsender, Amateurfunkanlagen, Funksprechgeräte oder Mobiltelefone, können die Steuerung von Elektromobilen beeinträchtigen. Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise, um die Gefahr von unbeabsichtigt gelösten Bremsen oder Bewegungen des Elektromobils und daraus resultierende schwere Personenschäden zu reduzieren.





ACHTUNG! Bitte bedenken Sie, dass das Elektromobil möglicherweise empfänglicher für Störungen durch Funkwellenquellen wird, wenn Sie es mit weiteren Zubehörteilen oder Komponenten ausstatten oder es auf sonstige Weise modifizieren. (Achtung: Die allgemeine Sicherheit des Elektromobils lässt sich nicht ohne weiteres abschätzen).

MACHEN SIE SICH MIT IHREM ELEKTROMOBIL VERTRAUT

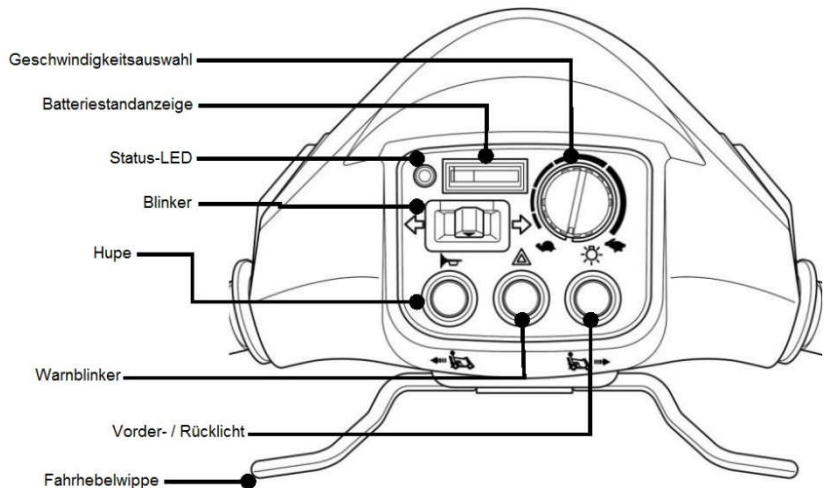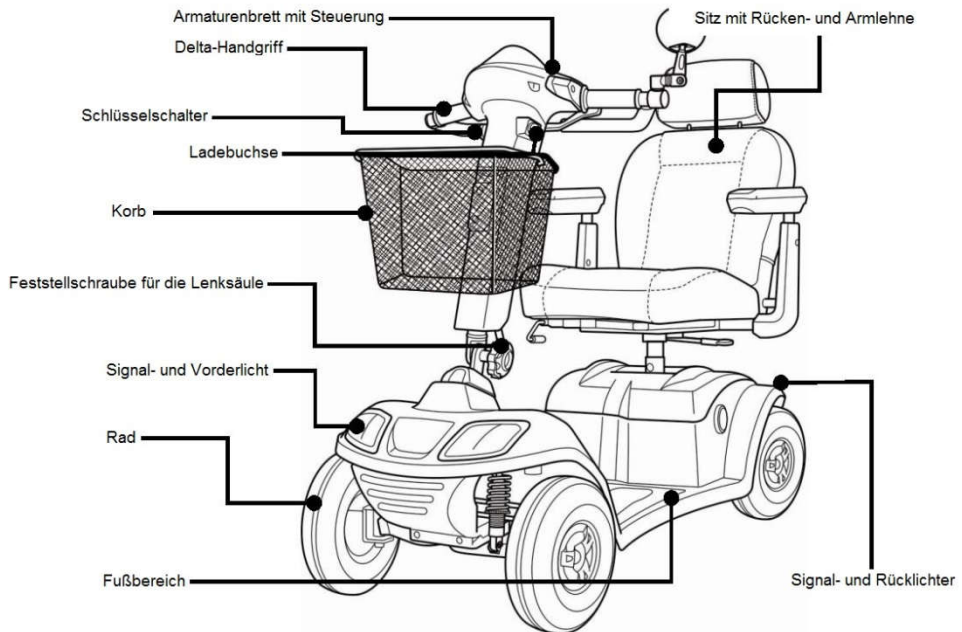

MACHEN SIE SICH MIT IHREM ELEKTROMOBIL VERTRAUT

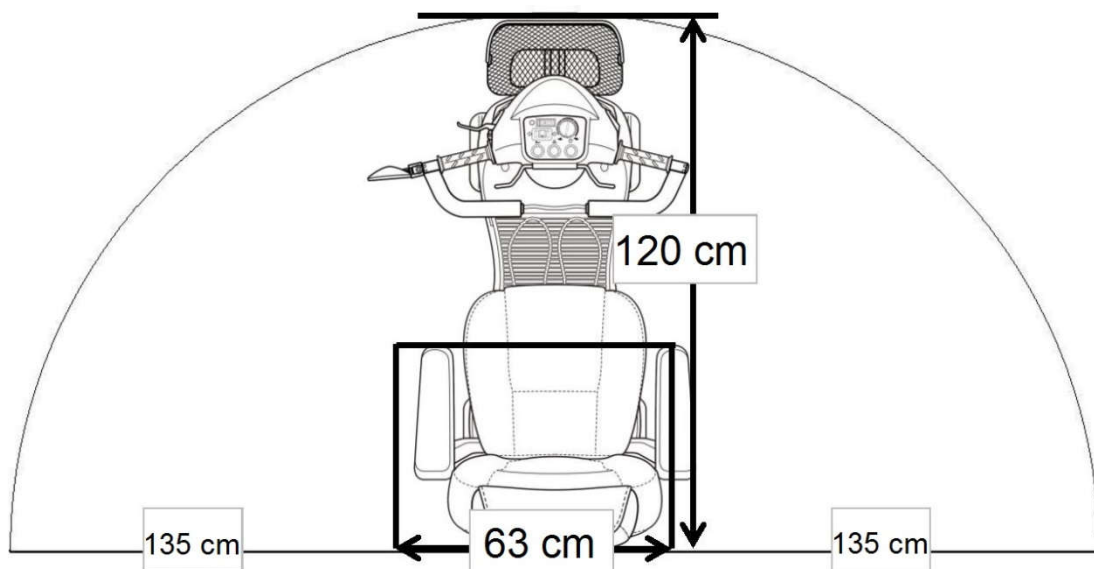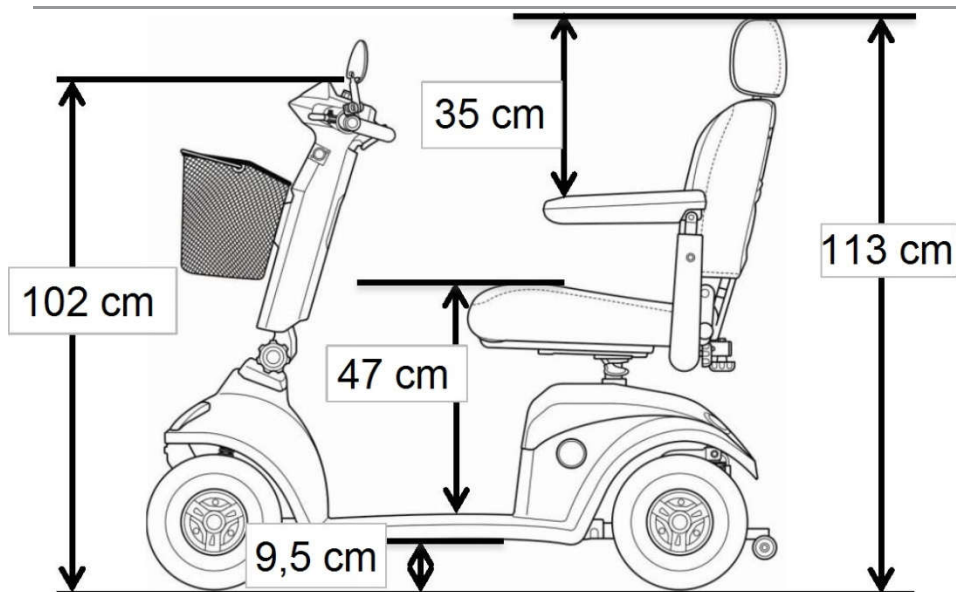

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellbezeichnung	Kymco Super H MV EQ35AB(GM)
Nutzergewicht	160 kg
Gesamthöhe	113 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamtbreite	58 cm
Antriebssystem	Hinterradantrieb, geschlossenes Getriebe, 24 V Gleichstrommotor
Motorleistung (Dauer / Spitze)	400 W / 680 W
Batterie	12 V x 35 Ah x 2Stk. / optional 45 Ah
Ladegerät	Extern Eingangsspannung: 200 / 250 VAC Ausgangsspannung: 24 VDC Ausgangsstrom: 4 A
Radgröße (vorne / hinten)	3.00-4 (Luftbereifung)
Heckantrieb	Geschlossenes Getriebe mit Differential
Bremssystem	- Elektromagnetische Motorbremse - Handbremse
maximaler Steigungswinkel	12 %
Reichweite (unter Testbedingungen)	ca. 25 km (35 Ah) / ca. 25-30 km (45 Ah)
Höchstgeschwindigkeit	vorwärts: 6 km/h rückwärts: 3,6 km/h
Wendekreis (Radius)	135 cm
Sitzhöhe vom Boden	60 cm / 62 cm / 64 cm
Breite der Sitzfläche	45 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzwinkel	4,5°
Rückenhöhe	43 cm
Rückenwinkel	-70° min. / 30° max. (von der Vertikalen)
Gewicht vom Sitz	14,4 kg

SCHIEBEN UND BEFÖRDERN DES ELEKTROMOBILS

1. Bitte studieren Sie zunächst die auf die Beförderung des Elektromobils bezogenen Sicherheitshinweise in Abschnitt 3.

2. Schieben des Elektromobils:

Um das Elektromobil schieben zu können, muss es sich im **Freilaufmodus** befinden, so dass der Motor deaktiviert ist.

Der entsprechende Hebel befindet sich hinten rechts am Fahrzeug.



ACHTUNG! Wenn der Hebel auf Freilauf gestellt wird,

- muss das Elektromobil auf ebenem Untergrund stehen.
- darf niemand im Elektromobil sitzen.

6.1 Schieben des Elektromobils:



= **Leerlaufmodus (A):**

(Motor ist deaktiviert)

1. Schalten Sie das Elektromobil aus und ziehen Sie den Schlüssel ab.
2. Ziehen Sie den Hebel bis zum Anschlag nach oben (siehe Abb.).
3. Schieben Sie das Elektromobil an die gewünschte Stelle.
4. Drücken Sie den Hebel bis zum Anschlag nach unten (siehe Abb.).



= **Fahrmodus (B):**

(Motor ist aktiviert)



SCHIEBEN UND BEFÖRDERN DES ELEKTROMOBILS



Schalten Sie das Elektromobil zum Schieben prinzipiell aus.




*Vergewissern Sie sich nach **allen** Anpassungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten **vor** der weiteren Nutzung, dass alle festen Komponenten sicher angezogen wurden. Andernfalls besteht die Gefahr von Sach- und/oder Personenschäden.*


6.2 Befördern des Elektromobils



1. Abnehmen des Sitzes

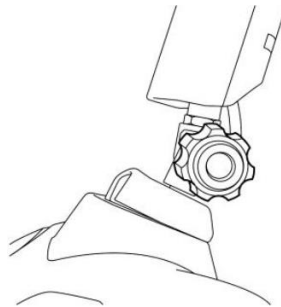

2. Verstellen des Knopfes

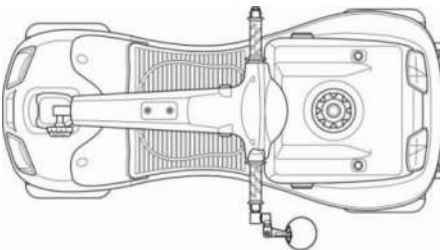


3. Einklappen der Lenksäule

SCHIEBEN UND BEFÖRDERN DES ELEKTROMOBILS

Komponenten:

1. Fahrgestell
2. Sitz
3. Korb

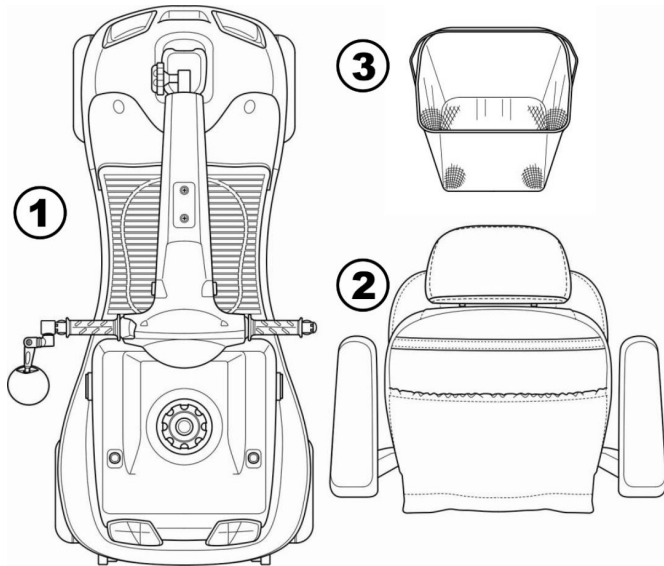

6.3 Beförderung des Elektromobils in Bussen des ÖPNV

Der Hersteller versichert, dass das Elektromobil aufgrund der technischen Beschaffenheit für die Beförderung mit aufsitzender Person in geeigneten Linienbussen des ÖPNV tauglich ist.

Beachten Sie, dass durch zusätzliche Anbauteile, wie z.B. ein rückwärtiger Korb oder ein Stockhalter, die zulässige Maximallänge für die Beförderung des Elektromobils von 1200mm überschritten werden kann.


Besprechen Sie sich vor der ersten Fahrt mit Ihrer zuständigen Behörde und / oder Ihrem Verkehrsbetrieb.

ANPASSEN DES ELEKTROMOBILS

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Ihr Elektromobil so anpassen und einstellen, dass Sie es bequem und sicher nutzen können.

7.1 EINSTELLEN DES ABSTANDES ZWISCHEN SITZ UND LENKER

1. Ziehen Sie den Sitzfeststellhebel nach oben und bewegen Sie den Sitz vor oder zurück, bis der gewünschte Abstand gegeben ist.
2. Lassen Sie den Feststellhebel los und aktivieren Sie die Verriegelung, indem Sie den Sitz leicht nach vorn oder hinten schieben.

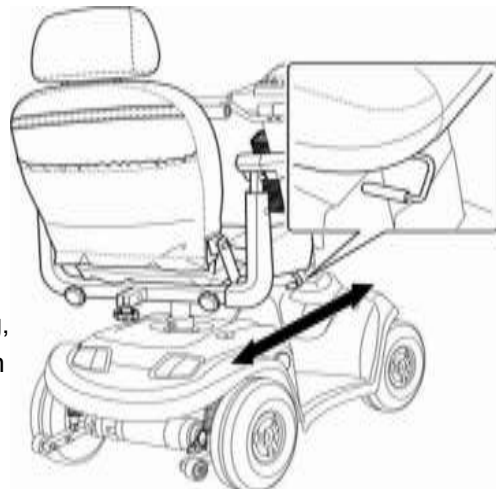


Unfallgefahr aufgrund von unzulänglich gesichertem Sitz:



Vergewissern Sie sich nach der Anpassung, dass der Sitz ordentlich gesichert ist, indem Sie versuchen ihn leicht vor oder zurück zu schieben.

7.2 SCHWENKEN DES SITZES ZUM AUF- ODER ABSTEIGEN

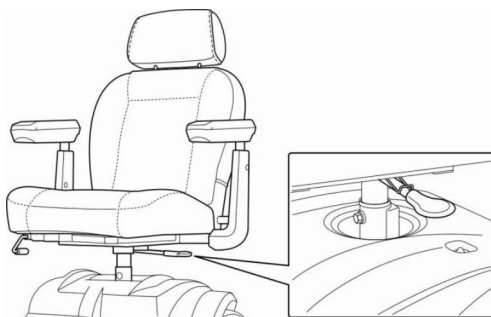

ANPASSEN DES ELEKTROMOBILS


1. Zum Aufsteigen ziehen Sie den Sitzhebel nach oben und drehen Sie den Sitz zur Seite (nach links oder rechts).
2. Setzen Sie sich auf den Sitz und drehen Sie den Sitz dann wieder in Fahrtrichtung. Arretieren Sie den Sitz in dieser Position, indem Sie den Sitzhebel loslassen. Legen Sie den Sicherheitsgurt an.



Vergewissern Sie sich nach der Anpassung, dass der Sitz ordentlich gesichert ist, indem Sie überprüfen, dass der Sitz sich auch dann nicht bewegt, wenn Sie versuchen ihn seitwärts zu drehen.

7.3 EINSTELLEN DER ARMLEHNEN

Die Armlehnen Ihres Elektromobils lassen sich nach oben wegklappen (1). Der Abstand der Armlehnen zum Sitz (2) ist stufenlos über die Schrauben (3) einstellbar.

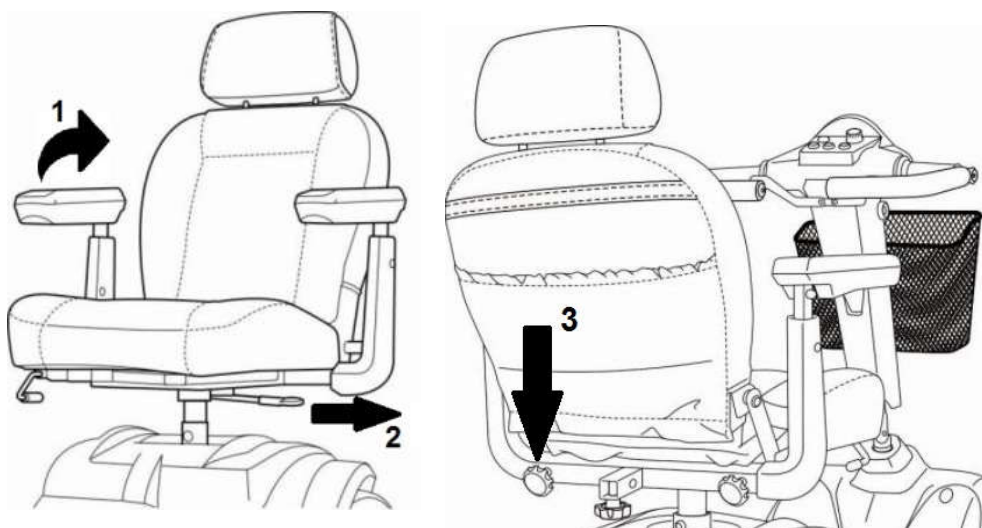

ANPASSEN DES ELEKTROMOBILS

7.4 EINSTELLEN DER SITZHÖHE

1. Stellen Sie sich hinter das Elektromobil. Betätigen Sie den Feststellhebel auf der linken Seite des Sitzes und nehmen Sie ihn vom Elektromobil ab.
2. Fassen Sie die Heckverkleidung an beiden Radkästen und heben Sie diese vorsichtig nach oben vom Fahrzeug. Lösen Sie den Stecker der Heckbeleuchtung vom Controller.
3. Lösen Sie die Schraube am oberen Ende der Sitzaufnahme und entfernen Sie den Sicherungsstift weiter unten.
4. Die Sitzaufnahme ist nun beweglich und lässt sich in drei Positionen mit dem Sicherungsstift fixieren.
5. Nachdem Sie die gewünschte Sitzhöhe eingestellt haben, befestigen Sie den Sicherungsstift und die Schraube am oberen Ende der Sitzaufnahme.
6. Schließen Sie die Heckbeleuchtung wieder an den Controller an und setzen Sie die Heckverkleidung wieder auf das Elektromobil.
7. Setzen Sie den Sitz wieder auf das Elektromobil und überprüfen Sie, dass er korrekt einrastet.
8. Überprüfen Sie alle Komponenten auf festen Sitz bevor Sie mit Ihrem Elektromobil fahren.

ANPASSEN DES ELEKTROMOBILS

7.5 NEIGUNGSWINKEL DER RÜCKENLEHNE EINSTELLEN

Die Neigung der Rückenlehne kann in drei Stufen arretiert werden.

1. Ziehen Sie den Feststellhebel heraus und schieben Sie die Rückenlehne nach vorn oder hinten in die gewünschte Position.
2. Lassen Sie den Feststellhebel los und prüfen Sie den Verriegelungsmechanismus, indem Sie die Rückenlehne leicht vor und zurück schieben.

Wenn die Rückenlehne nicht ordnungsgemäß verriegelt ist, besteht Unfallgefahr!



Vergewissern Sie sich nach der Anpassung, dass die Rückenlehne ordentlich gesichert ist, indem Sie überprüfen, dass sie sich auch dann nicht bewegt, wenn Sie versuchen sie leicht nach vorn oder hinten zu schieben.

7.6 HÖHE DER KOPFSTÜTZE ANPASSEN

Kopfstütze höher stellen:

Ziehen Sie die Kopfstütze bis auf die gewünschte Höhe nach oben, bis der untere Verriegelungsmechanismus hörbar einrastet.

Kopfstütze niedriger stellen:

Drücken Sie den Feststellhebel nach innen und schieben Sie die Kopfstütze auf die gewünschte Höhe herab.


Lassen Sie den Feststellhebel los und bewegen Sie die Kopfstütze leicht bis der Absenkschutz hörbar einrastet.

ANPASSEN DES ELEKTROMOBILS

7.7 NEIGUNGSWINKEL DER LENKSÄULE EINSTELLEN


Stellen Sie die Lenksäule so ein, dass Sie jederzeit problemlos an das Armaturenbrett gelangen und Ihr Elektromobil steuern können.

1. Drehen Sie den Feststellknopf, um diesen zu lösen (1).
2. Schieben Sie die Lenksäule nach vorn oder hinten in die gewünschte Position.
3. Ziehen Sie den Feststellknopf wieder fest.

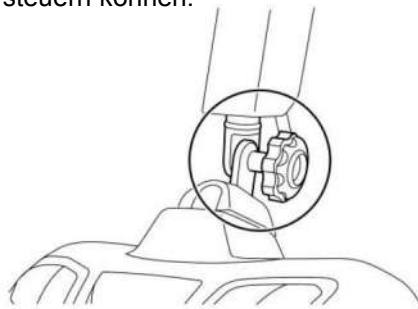

Achtung: Durch eine unzureichend fixierte Lenksäule besteht Unfallgefahr:


Vergewissern Sie sich nach der Anpassung, dass die Lenksäule ordentlich gesichert ist, indem Sie überprüfen, dass sie sich auch dann nicht bewegt, wenn Sie versuchen sie leicht nach vorn oder hinten zu schieben.

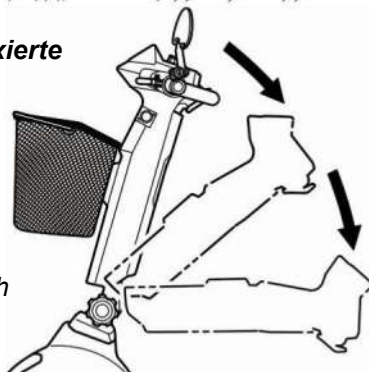

7.8 DREHEN DES SITZES

Der Sitz kann in beide Richtungen gedreht und (in 45°-Schritten) in 8 verschiedenen Positionen festgestellt werden. Ziehen Sie am Feststellhebel (1), drehen Sie den Sitz in die gewünschte Richtung bzw. auf die gewünschte Position (2) und fixieren Sie ihn dort.

ANPASSEN DES ELEKTROMOBILS

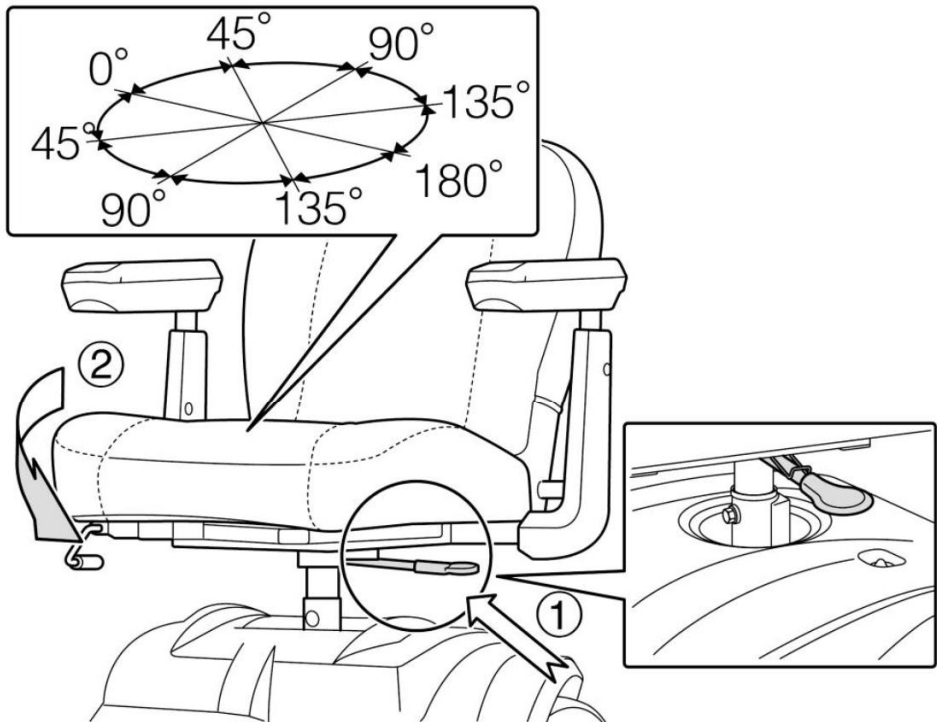

Unfallgefahr aufgrund von inkorrektter Sitzposition:

Drehen Sie den Sitz stets in Fahrtrichtung und fixieren Sie ihn vor dem Losfahren.

Bei gedrehtem Sitz erhöht sich die Gefahr, dass das Elektromobil umkippt.

Vergewissern Sie sich vor Änderung der Sitzposition grundsätzlich, dass das Elektromobil auf ebenem und festem Untergrund steht.

NUTZUNG DES ELEKTROMOBILS

NUTZUNG

Bitte führen Sie stets die im Abschnitt 3 „Allgemeine Sicherheitshinweise“ enthaltenen Angaben zur Sicherheit mit sich.

Stellen Sie vor dem Fahren Sitz und Lenksäule so ein, dass es für Sie bequem ist.



ACHTUNG! *Das Fahrverhalten einzelner Elektromobile ist unterschiedlich. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihr Elektromobil kennenzulernen, ehe Sie damit fahren.*



ACHTUNG! BITTE MACHEN SIE SICH BEWUSST, dass es Zeit und Übung braucht, bis Sie das Elektromobil sicher beherrschen.



ACHTUNG! *Der Kippschutz reduziert das Risiko, nach hinten umzukippen und sich dabei ernsthaft zu verletzen, deutlich.*

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für sicheres Fahren:

1. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets der aktuellen Verkehrssituation an.
2. Verringern Sie die Geschwindigkeit grundsätzlich beim Passieren
 - nicht einsehbarer Areale und enger Passagen
 - von engen Kurven / Anstiegen
 - von Rampen
3. Üben Sie das Fahren mit dem Elektromobil zunächst in einem Bereich, in dem es keine Fußgänger gibt bzw. der anderweitig abgesperrt ist.
4. Steuern Sie das Elektromobil stets mit beiden Händen am Griff.
5. Stellen Sie beim Fahren stets Ihre Füße auf der Fußablage des Elektromobils ab.

NUTZUNG DES ELEKTROMOBILS


Bitte vergewissern Sie sich vor dem Losfahren des Elektromobils:

dass das Elektromobil im Fahrmodus (nicht im Freilaufmodus) ist	Prüfen Sie, ob der Hebel für den Freilaufmodus nach unten gedrückt ist.
dass der Sitz in der gewünschten Position fixiert wurde	Bewegen Sie den Sitz vor und zurück bzw. versuchen Sie ihn zu drehen, um zu überprüfen, ob der Sitz wirklich eingearastet ist.
dass die Batterien geladen sind	Überprüfen Sie den Ladestatus der Batterien auf dem Armaturenbrett.
dass die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren	Dies prüfen Sie durch langsames Anfahren und Anhalten.
dass Reifen und Räder unbeschädigt sind und der Luftdruck korrekt ist	Unterziehen Sie Reifen und Räder einer Sichtprüfung.

8.1 AN- UND AUSSCHALTEN

Der entsprechende Schlüsselschalter befindet sich auf der rechten Seite des Armaturenbrettes.

Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn nach rechts, um das Elektromobil zu starten. Zum Ausschalten drehen Sie den Schlüssel nach links.

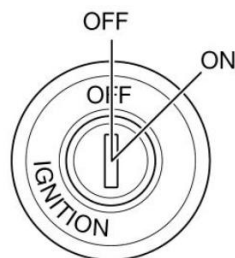


Steht der Schlüssel länger als 5 Minuten auf ON und das Elektromobil Wird nicht bewegt, geht das System in den Standby-Modus über. Die Status-LED generiert Blinksignal. Setzen Sie den Schlüsselschalter zurück (und schalten Sie das Fahrzeug erneut an).

Status-LED

8.2 STATUS-LED

Die Status-LED leuchtet grün:

Das Elektromobil ist angeschaltet und fahrbereit.

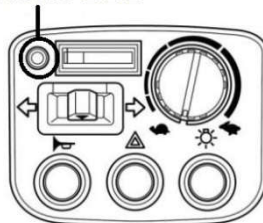

NUTZUNG DES ELEKTROMOBILS

Die Status-LED blinkt:

Möglicherweise liegt eine Störung vor. Schalten Sie das Elektromobil aus und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

8.3 EINSTELLEN DER GESCHWINDIGKEIT



Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Einstellung und Anpassen der Geschwindigkeit an die Verkehrssituation. Falls diese unklar ist, fahren Sie stets mit geringerer Geschwindigkeit.

Es gibt die Möglichkeit die maximale Geschwindigkeit Ihres Elektromobils zu steuern:

Geschwindigkeitsauswahl:

Sie befindet sich im oberen, rechten Bereich des Armaturenbrettes.



Erwartete Geschwindigkeiten:


Die Fahrgeschwindigkeiten wurden unter kontrollierten Bedingungen getestet und können - abhängig von jeweiligen Bedingungen und Beladungen - variieren.

Vorwärtsfahrt	 Schildkröte Hase
	3 km/h – 6 km/h
Rückwärtsfahrt	 Schildkröte Hase
	1,2 km/h - 3,6 km/h

NUTZUNG DES ELEKTROMOBILS



8.4 VOR- UND RÜCKWÄRTSFAHREN

Halten Sie die Griffe am Lenker mit beiden Händen fest. Um vorwärts zu fahren, ziehen Sie mit dem rechten Zeige- und Mittelfinger an der rechten Seite der Fahrhebelwippe.

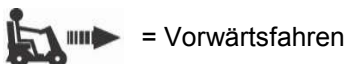

Lassen Sie die Fahrhebelwippe los, damit das Elektromobil anhält.

Um rückwärts zu fahren, ziehen Sie mit dem linken Zeige- und Mittelfinger an der linken Seite der Fahrhebelwippe.

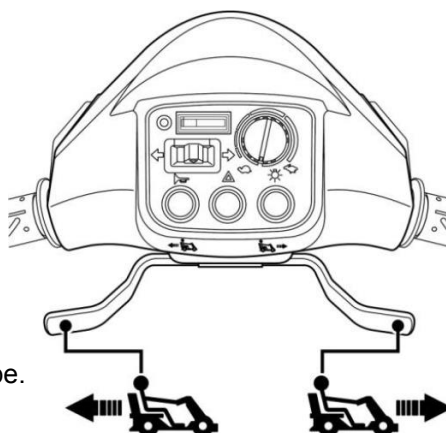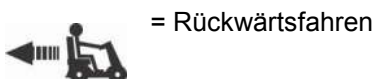

Ziehen Sie nicht gleichzeitig an beiden Seiten der Fahrhebelwippe!

8.5 BREMSEN UND FESTSTELLBREMSE VERWENDEN

1. Verwendung der elektromagnetischen Motorbremse:


Wenn die Fahrhebelwippe losgelassen wird und in die mittlere Stellung zurückkehrt, wird die Bremse betätigt und hält das Elektromobil an.



Notbremse =

Fahrhebelwippe loslassen

Die Fahrhebelwippe kehrt automatisch auf die mittlere Stellung zurück, wenn Sie sie loslassen. Das Elektromobil hält dann automatisch an.

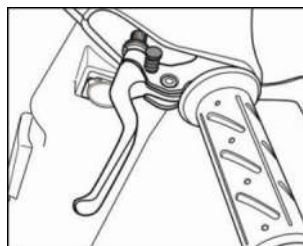

2. Verwendung der Handbremse:

Um die Handbremse zu betätigen, ziehen Sie den Bremshebel langsam in Richtung der Lenkstange.

NUTZUNG DES ELEKTROMOBILS




Kippgefahr


Wird die Handbremse zu fest oder zu plötzlich angezogen, kann das Elektromobil umkippen. Ziehen Sie die Bremse deshalb langsam an.

3. Feststellbremse

Das Fahrzeug verfügt über eine Feststellbremse, die zusätzlich die Vorderräder blockiert und höhere Sicherheit vor Unfällen beim Anhalten an Abhängen bietet.

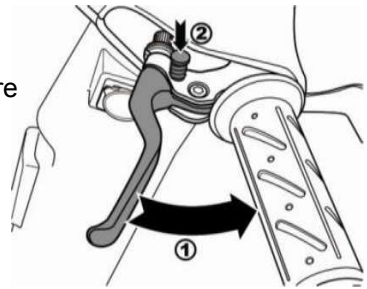

Ziehen und halten Sie den Bremshebel und drücken Sie dann den Sicherungsstift in die Positionsfixierung.

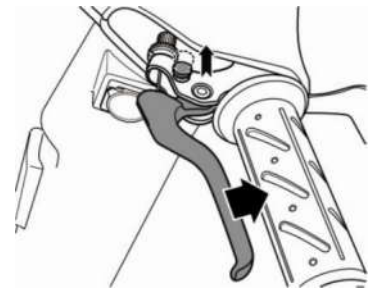

Um die Feststellbremse wieder zu lösen, ziehen Sie den Bremshebel. Der Sicherungsstift kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.

8.6 ÜBERLASTSCHUTZ

Wird der Motor überlastet (etwa bei dem Versuch, zu hohe Hindernisse wie Randsteine oder zu steile Anstiege zu bewältigen), schaltet der Überlastschutz ihn automatisch ab.

Bei Überlastung des Motors geschieht Folgendes:

- Das Elektromobil wird zunächst merklich langsamer und hält schließlich an.
- Die Steuerung schaltet den Motor ab.

Gegenmaßnahmen:

Schalten Sie das Elektromobil ab und lassen Sie es mindestens 10 Minuten lang abkühlen.


Schalten Sie das Elektromobil dann wieder an und umfahren Sie das Hindernis (z.B. den Randstein).

NUTZUNG DES ELEKTROMOBILS

8.7 BETÄTIGEN DER HUPE


Druckschalter (gelb):

Drücken Sie hierzu den Knopf für die Hupe.
Die Hupe ertönt, solange Sie den Knopf gedrückt halten.

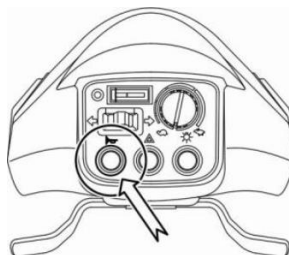

BETÄTIGEN DER BLINKER


Um den rechten Blinker zu betätigen,
schieben Sie den Blinkerschalter nach rechts.
Um den linken Blinker zu betätigen,
schieben Sie den Blinkerschalter nach links.
Ein Signalton erklingt. Nach dem Abbiegen,
drücken Sie den Schalter, um den Blinker abzustellen.

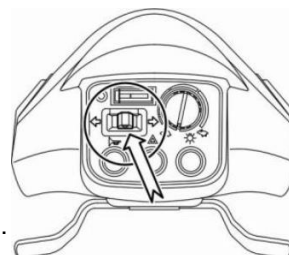

8.8 EINSCHALTEN DER SCHEINWERFER

Druckschalter (blau):

Anschalten = einmal drücken
Ausschalten = erneutes drücken
Der Druckschalter leuchtet auf und zeigt so,
dass die Scheinwerfer eingeschaltet sind.

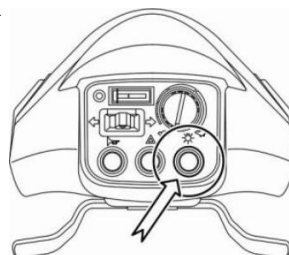


Beim Fahren mit angeschalteten Scheinwerfern entleeren sich die Batterien schneller, wodurch sich die Reichweite des Elektromobils verringert.

8.9 EINSCHALTEN DER WARNBLINKER

Druckschalter (rot):

Anschalten = einmal drücken
Ausschalten = erneutes drücken
Der Druckschalter leuchtet auf und ein Signalton erklingt um anzuzeigen, dass der Warnblinker eingeschaltet ist.

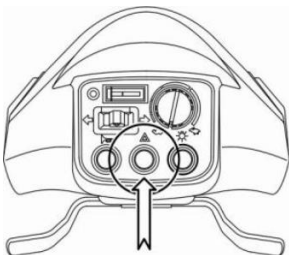

Wird das Elektromobil mit eingeschalteten Warnblinkern zurückgelassen, entleert sich die Batterie.


NUTZUNG DES ELEKTROMOBILS

8.10 ABSCHALTEN / ABSTELLEN DES ELEKTROMOBILS

Drehen Sie den Schlüssel nach links, um das Elektromobil abzuschalten.

Schalten Sie das Elektromobil stets mit Hilfe des Zündschlüssels ab, wenn Sie

- ein- oder aussteigen möchten.
- beabsichtigen länger nicht zu fahren.

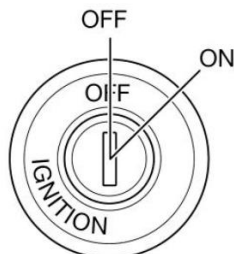

Ziehen Sie den Zündschlüssel stets ab, wenn Sie das Elektromobil abstellen und stehen lassen möchten.

BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN

9. BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN

	Batterien enthalten ätzende Chemikalien
	Explosionsgefahr!
	Verwenden Sie keinesfalls Batterien von unterschiedlicher Amperestundenleistung (Ah).
	Halten Sie Werkzeuge und andere Metallgegenstände nicht an die Batterieklemmen - Stromschlaggefahr!
	Die Batterien enthalten brennbares Material. Halten Sie sie deshalb fern von Wärmequellen wie offenem Feuer oder auch Funken. Batterien nicht gemeinsam mit brennbaren oder entflammenden Gegenständen transportieren.
	Entsorgung und Wiederverwertung: Bitte kontaktieren Sie Ihren anerkannten Vertriebspartner



Neue Batterien sind vor dem Erstgebrauch mit dem Gerät **unbedingt** vollständig aufzuladen (ca. 24 Stunden).

Laden Sie neue Batterien vor dem Erstgebrauch stets auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Grundsätzlich sollten Sie die Batterien so oft wie möglich aufladen, damit sie möglichst lange halten und sich die erforderliche Ladezeit verringert. Am besten planen Sie das Aufladen der Batterien in einem Zeitraum ein, während dem Sie nicht beabsichtigen, das Gerät zu nutzen.

Starke Beanspruchung auf Anstiegen kann die Reichweite pro Ladung drastisch verringern.

Bei Außentemperaturen von weniger als 10°C verringert sich die Reichweite der Batterien um bis zu 25%.

BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN


9.1 BATTERIESTATUSANZEIGE

Die Batteriestatusanzeige (Nadelanzeige) auf dem Armaturenbrett zeigt den aktuellen Ladestand an.



High (grün): hohe Reichweite

Reserve (rot): Fahrt schnellstmöglich beenden und Batterien sofort aufladen.

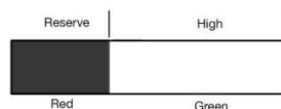

Steht das Elektromobil, wird häufig ein Batterieladestatus angezeigt, der höher ist als der tatsächliche. Abhängig von der Ladung, kann die Batteriestatusanzeige auch während der Fahrt beträchtlich schwanken.

Wird das Gerät stark belastet (etwa durch hohe Geschwindigkeiten oder Anstiege), kann sich der angezeigte Batterieladestatus dem Leerzustand nähern, ohne dass dies dem tatsächlichen Ladezustand der Batterien entspricht.

Nach dem Fahren kann sich der angezeigte Batterieladestatus dem vollen Bereich nähern, wenn das Gerät längere Zeit abgeschaltet ist.

Falls der angezeigte Batterieladestatus nach dem Fahren im Leerbereich ist, laden Sie die Batterie bitte unverzüglich auf, da andernfalls die Batterie Schaden nehmen könnte.

9.2 LADEN DER BATTERIEN

Bitte beachten Sie unbedingt die korrekte Reihenfolge beim Anschließen und Trennen des Batterieladegeräts.

1. Stellen Sie das Elektromobil in der Nähe einer Steckdose ab.
2. Schalten Sie das Elektromobil **aus** und ziehen Sie den Schlüssel ab.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Hebel für den Leerlaufmodus nach unten zeigt und auf „Fahrt“ steht.

BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN

4. Stecken Sie den Stecker des Batterieladegeräts in die Ladebuchse des Elektromobils. Diese befindet sich an der linken Seite der Lenksäule.
5. Stecken Sie das Batterieladekabel (1) in die entsprechende Buchse (2) am Ladegerät.
6. Stecken Sie nun den Stecker des Batterieladegeräts in eine Steckdose (Wechselstrom 180-240 V, 50 Hz) und laden Sie die Batterie.
7. Wir empfehlen, die Batterien 10 bis 12 Stunden lang zu laden.



Nutzen Sie die Steckdose nicht gleichzeitig für andere Geräte.




Um die Gefahr eines Stromschlages auszuschließen, schließen Sie das Gerät bitte ausschließlich an geerdete Stromleitungen an.




Benutzen Sie für das Batterieladegerät keinesfalls ein Verlängerungskabel!

Schritt 1. Stellen Sie das Elektromobil in der Nähe einer Steckdose ab.

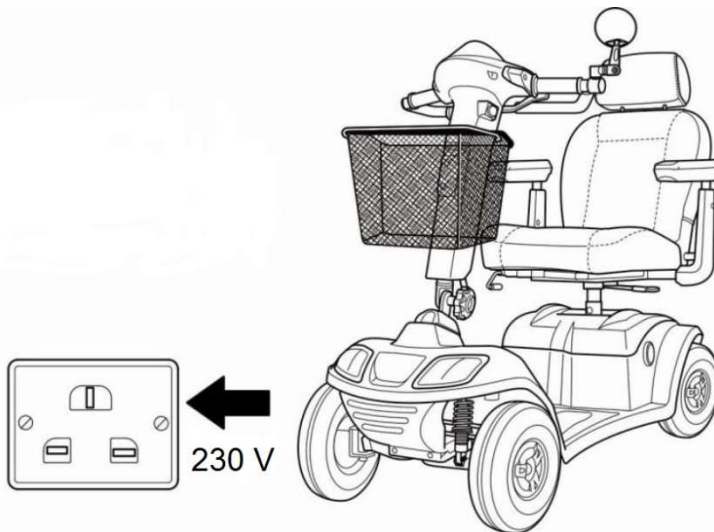


BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN


Schritt 2. Schalten Sie das Elektromobil aus und ziehen Sie den Schlüssel ab.

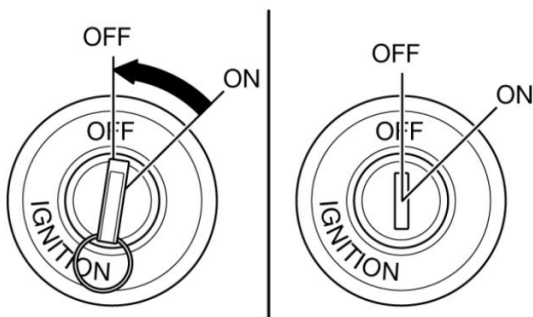

Schritt 3. Vergewissern Sie sich, dass der Hebel für den Freilaumodus nach unten zeigt und auf „Fahrt“ steht.

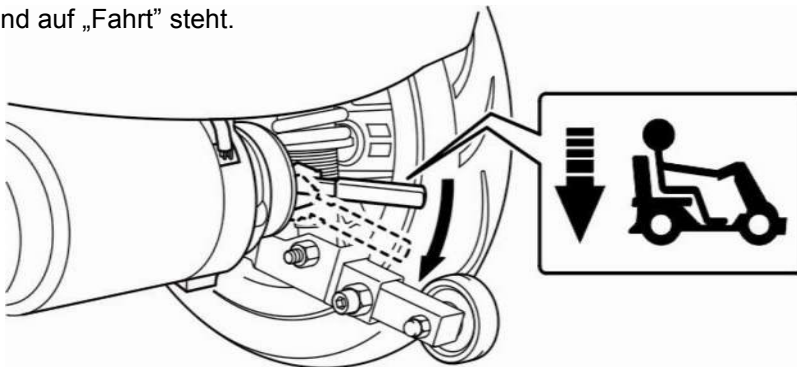


Schritt 4. Stecken Sie den Stecker des Batterieladegeräts in die Ladebuchse des Elektromobils. Diese befindet sich an der linken Seite der Lenksäule.

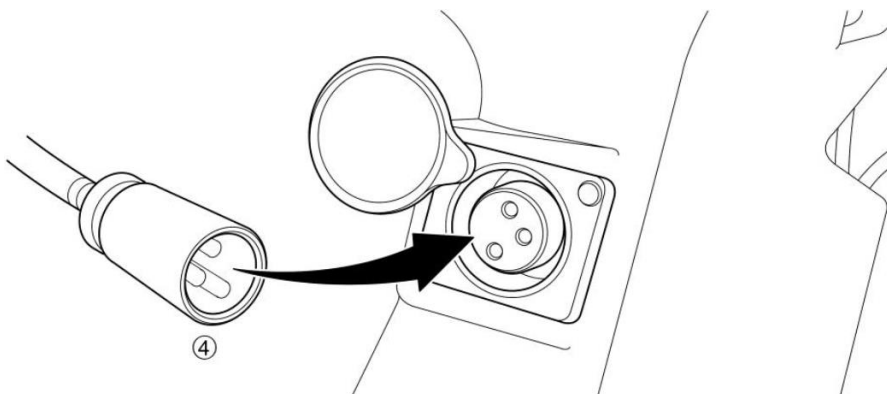


BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN

Schritt 5. Stecken Sie das Batterieladekabel (1) in die entsprechende Buchse (2) am Ladegerät.

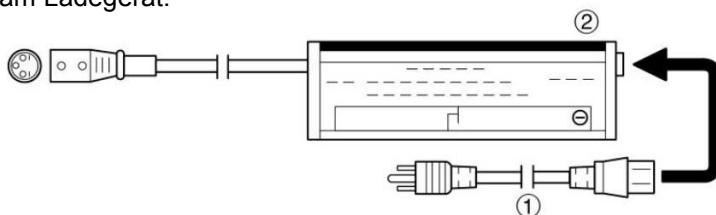


Schritt 6. Stecken Sie nun den Stecker des Batterieladegeräts in eine Steckdose (Wechselstrom 180-240 V, 50 Hz) und laden Sie die Batterie.

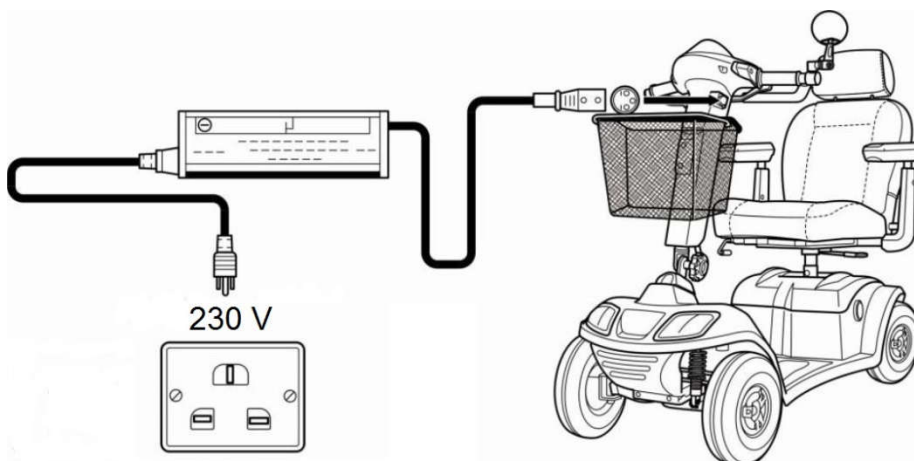

BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN

LED-Anzeigen am Ladegerät während des Ladevorganges:

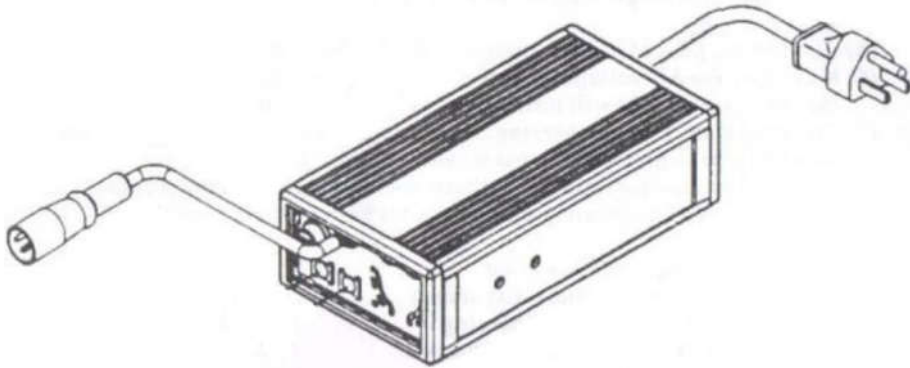

Das Ladegerät ist mit 2 LEDs ausgestattet.

1. LED Status Ladegerät
2. LED Status Ladevorgang

LED Status Ladegerät

LED → Farbe → Bedeutung

- 1 --- ROT --- Batterieladegerät eingeschaltet
- 2 --- nicht aktiv --- Batterieladegerät ausgeschaltet

LED Status Ladevorgang

LED → Farbe → Bedeutung

- 1 --- nicht aktiv --- Batterieladegerät nicht an die Batterie angeschlossen
- 2 --- GELB --- Ladevorgang läuft
- 3 --- GRÜN --- Ladevorgang abgeschlossen

9.3 NACH DEM LADEN

- (1) Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Buchse am Elektromobil.
- (2) Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

BATTERIEN UND LADEN DER BATTERIEN

9.4 FEHLERMELDUNGEN

Blink-code	Beschreibung	Mögliche Lösung
1	Batterie muss geladen werden oder ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anschlüsse der Batterien. Sind diese in Ordnung, versuchen Sie die Batterien zu laden. Ggf. wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.
2	Schlechte Verbindung zum Motor.	Überprüfen Sie alle Verbindungen zwischen Motor und Steuerung, sowie die Kohlebürsten. Ggf. wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.
3	Zwischen Motor und einem Batterieanschluss gibt es einen Kurzschluss.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.
4	Nicht belegt	-
5	Nicht belegt	-
6	Der Controller wird blockiert.	Entfernen Sie das Ladegerät, wenn dieses angeschlossen ist.
7	Das Potentiometer der Fahrhebelwippe ist beim Einschalten ausgelenkt.	Schalten Sie das Fahrzeug aus. Lassen Sie die Fahrhebelwippe los. Schalten Sie das Fahrzeug erneut ein. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.
8	Fehler des Controllers.	Prüfen Sie die Anschlüsse am Controller. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.
9	Fehlerhafte Verbindung zur Magnetbremse	Stellen Sie das Fahrzeug auf Freilaufbetrieb und wieder in den Fahrbetrieb. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.
10	Überspannung am Controller.	Prüfen Sie die Batterieanschlüsse auf festen Sitz. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.

HINWEISE ZUM WIEDEREINSATZ

10. HINWEISE ZUM WIEDEREINSATZ

Das Elektromobil ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Bevor es an einen anderen Nutzer weitergegeben wird, ist es durch einen Fachhändler zu warten und hygienisch aufzubereiten. Bei der Weitergabe des Elektromobils denken Sie bitte daran, diese Bedienungsanleitung und die Anschrift des Fachhändlers dem neuen Nutzer zu übergeben.

11. REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSHINWEISE FÜR UNKRITISCHE MEDIZINPRODUKTE

11.1 Reinigung

Beachten Sie die Angaben des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers.

Grobe Verschmutzungen des Medizinproduktes sind unmittelbar nach der Anwendung zu entfernen. Rahmentteile und Verkleidungen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie ein mildes, haushaltsübliches Reinigungsmittel verwenden. Achten Sie darauf, alle Oberflächen des Produktes gründlich zu säubern. Reinigungsmittelrückstände können anschließend mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche. Reinigungsmittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol dürfen nicht verwendet werden.

Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger. Elektronikbauteile und Kabel dürfen nicht in Kontakt mit Wasser kommen.

REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSHINWEISE

11.2 Desinfektion

Beachten Sie die Konzentration und Einwirkzeiten des Desinfektionsmittelherstellers. Das Produkt eignet sich zur Sprüh- und Wischdesinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln. Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Benetzen Sie das Produkt gleichmäßig mit Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Desinfektionsmittel nicht nach und lassen Sie das Produkt an der Luft trocknen. Anschließend ist das Produkt auf Sauberkeit und Beschädigungen zu überprüfen.

Verwenden Sie ein VAH-gelistetes Desinfektionsmittel.

12. SERVICE UND WARTUNG

Nach Wartungsarbeiten oder Reparaturen am Elektromobil müssen Sie vor der Benutzung sicherstellen, dass es richtig funktioniert.

- Nehmen Sie eine Sichtüberprüfung des Elektromobils vor, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt positioniert und am Elektromobil befestigt sind und dass alle Befestigungen ausreichend festgezogen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sitz richtig montiert und eingestellt ist.
- Schalten Sie das Elektromobil ein. Sollte die Status-LED nach dem Startvorgang weiterhin blinken, lesen Sie die Informationen im Abschnitt 9.4 „FEHLERMELDUNGEN“.
- Überprüfen Sie die Feststellbremse.
- Betätigen Sie alle elektrischen Optionen, einschließlich Scheinwerfer und Blinker, um sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren.
- Fahren Sie das Elektromobil, um sicherzustellen, dass das Elektromobil so funktioniert, wie vorher.

SERVICE UND WARTUNG



Führen Sie nur die unten aufgeführten Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch.



Versuchen Sie keine Aufgaben auszuführen, bei denen Sie sich nicht sicher sind.

Wartungs- und Inspektionsintervalle	Täglich	Wöchentlich	Vierteljährlich	Halbjährlich	Jährlich
Batterieanzeige und Ladestand überprüfen	X				
Überprüfen, ob die Steuerhebel an der Lenksäule nicht verbogen oder beschädigt sind.	X				
Sicherstellen, dass alle abnehmbaren Teile sicher befestigt sind.	X				
Überprüfen, dass die Feststellbremse einrastet und sich löst.		X			
Reifen überprüfen und bei Bedarf aufpumpen		X			
Überprüfen, dass alle sichtbaren Muttern und Schrauben fest angezogen sind.		X			
Überprüfen, dass alle Kabel und Steckverbindungen in Ordnung und sauber verstaut sind.		X			
Elektromobil und Polster regelmäßig reinigen.		X			
Überprüfung der Batteriepole auf Anzeichen von Korrosion.			X		
Polster, Sitz, Armlehnen, Kopfstütze, Armpolster auf Verschleiß und Sitzein- und -ausbau überprüfen.				X	
Komplette Inspektion, Sicherheitsprüfung und Service sollte durch einen autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.					X

SERVICE UND WARTUNG

Dieser Abschnitt ist als Hilfe für die Aufzeichnungen von Wartungsarbeiten und Reparaturen, die an Ihrem Elektromobil ausgeführt worden sind, vorgesehen. Ihr Fachhändler füllt diesen Teil aus und gibt Ihnen das Handbuch wieder zurück.

HINWEIS: Bitte wenden Sie sich für alle Garantie-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Ihren Fachhändler.

Seriennummer				
Jahr	1	2	3	4
Steuerung				
An- / Aus-Schalter				
Ausgangsstecker				
Betrieb				
Dynamische Bremse				
Programmierbare Konfiguration				
Batterien				
Schäden				
Verbindungen				
Entladungstest				
Räder / Reifen				
Abnutzung				
Druck				
Lager				
Radmuttern				
Motor				
Verkabelung				
Geräusch				
Verbindungen				
Bremse				
Kohlebürsten				
Freilaufmechanismus				
Fahrgestell				
Zustand				
Lenkung				

SERVICE UND WARTUNG

Polsterung				
Sitz				
Rücken				
Armlehnen				
Elektrik				
Zustand des Kabelbaums				
Verbindungen				
Licht und Blinker				
Testfahrt				
Vorwärts				
Rückwärts				
Notbremung				
Linkskurve				
Rechtskurve				
Bergauf / Bergab				
Über Hindernis				
Feststellbremse				

Stempel des Fachhändlers / Datum

1

Stempel des Fachhändlers / Datum

2

Stempel des Fachhändlers / Datum

3

Stempel des Fachhändlers / Datum

4

GARANTIE

Auf das Modell Super HVM gewährt der Hersteller Kymco Healthcare 24 Monate Garantie ab Kaufdatum. Ausgenommen der Batterien, hier 6 Monate ab Kaufdatum.

Nicht im Garantiebereich enthalten sind Verschleißteile, wie Reifen, Kohlebürsten usw., sowie alle aufgrund missbräuchlicher und unsachgemäßer Nutzung beschädigten Komponenten.

Bei nicht zulässigen Änderungen oder Modifizierungen erlischt die Garantie.

Informieren Sie Ihren Vertriebspartner, von dem Sie Ihr Elektromobil bezogen haben, unverzüglich über alle entdeckten Defekte und Mängel.

Haftungsbeschränkung

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die aus der Beseitigung von Fehlern resultierenden Folgekosten, wie insbesondere Fracht- und Reisekosten, entgangene Einkünfte, Spesen usw.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und / oder Sachschäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch oder der Nichtbeachtung der hier dargelegten Anweisungen.

Kaufbar beim Online-Fachhandel

HMMso Seniorenmobil

Sven Oppel
in de Krümm 9
22880 Wedel

Telefon: 04103 9654104
Telefax: 04103-9654336

E-Mail: info@seniorenmobil.org
Internet: www.seniorenmobil.org

KWANG YANG Motor Co., Ltd.

Erste Fassung, 10/2017

Alle Rechte vorbehalten. Jedwede Vervielfältigung und
der unrechtmäßige Gebrauch ohne schriftliche Zustimmung der
KWANG YANG Motor Co., Ltd. sind strengstens untersagt.

T300-EQ35AB-A1



- NO.35 Wansing St., Sanmin District, Kaohsiung City,
80794 Taiwan, (R.O.C.)
- NO.61, Zhongshan S. Rd., Luzhu District, Kaohsiung
City 82151, Taiwan (R.O.C.)

Drucklegung: 10/2017



Importeur:

KYMCO Healthcare UK Limited
30 North Road,
Bridgend Industrial Estate
Bridgend CF31 3TP
Tel.: +44(0)1656 645755
FAX: +44(0)1656 661983
E-Mail: sales@kymcohealthcare.co.uk
Internet: www.kymcohealthcare.com

Vertriebspartner:

aktiv Deutschland Elektromobile GmbH & Co. KG
Gnutzer Str. 14
D-24589 Nortorf
Tel.: +49(0)4392 / 913090
FAX: +49(0)4392 / 9130910
E-Mail: info@aktivdeutschland.de
Internet: www.aktivdeutschland.de



KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

No.35 Wan Hsing Street, San Min District

Kaohsiung Taiwan, Volksrepublik China

Telefon: 886-7-3822526

Fax: 886-7-3950021

T300-EQ35AB-A1

Erste Fassung, 10/2017
